

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her eyes and skin. Her skin is covered with numerous small, clear water droplets, giving it a fresh and hydrated appearance. She has light-colored eyes and is looking slightly to the side. The background is a soft, out-of-focus grey.

EsteFILL[®]

HYALURONIC ACID SODIUM SALT

ПРОТОКОЛЫ

Протокол 1

OUT OF TIME

ВНЕ ВРЕМЕНИ



Молодой и средний возраст – 2 сессии с интервалом 3 недели. Повторный курс через 6-12 мес.



Протокол:

Рекомендуемый интервал между процедурами – 3 недели, рекомендуемое количество процедур в курсе – 2 процедуры, поддерживающая процедура 1 раз в 6-12 месяцев (в зависимости от первичного состояния кожи и образа жизни пациента)



Техники введения:

Микропапулы, дермальные папулы, микроболусы (по точкам), линейная ретроградная, канюльная

Интервал:

1 процедура раз в 3 недели - 2 процедуры

Базовый протокол работы с возрастными изменениями кожи. Основной этап для подготовки к дальнейшим процедурам (аппаратным методикам, нитевому лифтингу, коллагенстимулирующим процедурам, объемному моделированию, срединным химическим пилингам)

EsteFILL Revital + EsteFILL Revital



Показания:

- Сухость и выраженная дегидратация кожи;
- Фото- и хроностарение кожи лица и тела;
- Подготовка к инъекционной пластике и аппаратным процедурам (фотоомоложению, лазерной терапии, радиоволновому и ультразвуковому лифтингу), химическим пилингам, реабилитация после пилингов;
- Подготовка к загару, восстановление после фотоповреждения;
- Коррекция атрофических рубцов;
- Подготовка к пластическим операциям и реабилитация после них;
- Стрессовое повреждение кожи любой этиологии.

Протокол 2

ALWAYS BE YOUNG

ВСЕГДА БУДЬ МОЛОДОЙ



Перименопаузальный возраст – 3 сессии с интервалом 3 недели. Повторный курс с интервалом 3-6 мес.



Протокол:

Рекомендуемый интервал между процедурами - 3 недели, рекомендуемое количество процедур в курсе – 3 процедуры, поддерживающая процедура 1 раз в 3-6 месяцев (в зависимости от первичного состояния кожи и образа жизни пациента)



Техники введения:

Микропапулы, дермальные папулы, микроболусы (по точкам), линейная ретроградная, канюльная

Интервал:

1 процедура раз в 3 недели - 3 процедуры

Базовый протокол работы с возрастными изменениями кожи. Основной этап для подготовки к дальнейшим процедурам (аппаратным методикам, нитевому лифтингу, колагенстимулирующим процедурам, объемному моделированию, срединным химическим пилингам)

EsteFILL Revital + EsteFILL Revital + EsteFILL Revital



Показания:

- Сухость и выраженная дегидратация кожи;
- Фото- и хроностарение кожи лица и тела;
- Подготовка к инъекционной пластике и аппаратным процедурам (фотоомоложению, лазерной терапии, радиоволновому и ультразвуковому лифтингу), химическим пилингам, реабилитация после пилингов;
- Подготовка к загару, восстановление после фотоповреждения;
- Коррекция атрофических рубцов;
- Подготовка к пластическим операциям и реабилитация после них;
- Стрессовое повреждение кожи любой этиологии.

Протокол 3

GLOW BEAUTY

«СИЯЮЩАЯ КРАСОТА»

Двойной эффект сияния и увлажнения на длительный срок. Для проведения сочетанной процедуры рекомендуется использовать АНА-кислоты с концентрацией и pH, обеспечивающими поверхностное действие: молочная, миндальная, фитиновая, глюконовая, лактобионовая, феруловая и т.п.).

Химический пилинг + EsteFILL Revital

ХИМИЧЕСКИЙ
ПИЛИНГ



Показания:

- Улучшение микрорельефа кожи;
- Нормализация кератолитических процессов;
- Стимуляция коллагеногенеза;
- Восполнение гидрорезерва кожи;
- Сухость и выраженная дегидратация кожи;
- Фото- и хроностарение кожи лица и тела;
- Тусклый цвет лица, кожа курильщика.



Процедура «На выход».



Протокол:

1. Поверхностная химическая/энзимная эксфолиация, затем
2. EsteFILL Revital проводится в одну сессию, инъекционная процедура выполняется без нанесения аппликационной анестезии сразу после химического пилинга



Рекомендуемая техника:

Канюльная: канюля 25G 50-70 мм по 1 мл на сторону/по биоактивным точкам микроболусно

Интервал:

Выполняется в одну процедуру

Протокол 4

NEW YOU

«НОВАЯ ТЫ»

применение EsteFILL Revital
в сочетании с химическими пилингами



Протокол для профилактики
и коррекции признаков
старения кожи.



Протокол:

Инъекцирование EsteFILL Revital
проводится сразу после проведения
поверхностного пилинга, в одну
процедуру, **БЕЗ НАНЕСЕНИЯ**
АНЕСТЕЗИИ; рекомендуемый
интервал между процедурами -
2 недели, рекомендуемое
количество процедур в курсе – **3**
процедуры



Техники введения:

микроболусы (по точкам), канюльная
(канюля 25G 50-70 мм по 1 мл на
сторону)

Интервал:

1 процедура раз в 7 дней - 5 процедур

Для проведения сочетанной процедуры рекомендуется использовать АНА-кислоты с концентрацией и pH, обеспечивающими поверхностное действие: молочная, миндальная, фитиновая, глюконовая, лактобионовая, феруловая и т.п.).

EsteFILL Revital + химический пилинг + EsteFILL Revital + химический пилинг + EsteFILL Revital + химический пилинг



Показания:

- Сухость и выраженная дегидратация кожи;
- Гиперкератоз, неровный тон кожи;
- Себорея;
- Фото- и хроностарение кожи лица и тела;
- Подготовка к инъекционной пластике и аппаратным процедурам (фотоомоложению, лазерной терапии, радиоволновому и ультразвуковому лифтингу), химическим пилингам, реабилитация после пилингов;
- Подготовка к загару, восстановление после фотоповреждения;
- Коррекция атрофических рубцов;
- Подготовка к пластическим операциям и реабилитация после них.

Протокол 5

TIME MACHINE

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»

применения EsteFILL Revital
в сочетании с аппаратными методиками



Аппаратные процедуры
без повреждения эпидермиса:
Протокол для профилактики
и коррекции признаков старения кожи.



Протокол:

В качестве подготовительного этапа
проводится 1 процедура биоревитализации
для повышения гидрорезерва тканей.

Аппаратные методики проводятся основным
курсом 6 процедур (интервал 2 недели).

Затем вторым этапом с интервалом 2 недели
проводится 3 процедуры биоревитализации.

Если аппаратная методика предполагает
проведение одной процедуры в неделю
(6 процедур), то возможно проведение
инъекционной процедуры не ранее 2-3 дней
после аппаратной.



Техники введения:

Бугорковая техника/микропапульная/ по точкам

Интервал:

Все процедуры проводятся
с интервалом 2 недели

Сочетание аппаратной процедуры
и биоревитализации «EsteFILL Revital» в один день:

При прогреве тканей неизбежно расширение сосудов и,
следовательно, увеличивается возможность образования синяков
после процедуры биоревитализации. Поэтому сочетание
аппаратных методик с биоревитализацией в одну процедуру
допустимо, но нежелательно.

Курс биоревитализации «EsteFILL Revital» - Курс
аппаратных процедур

Аппаратные методики (IPL в шаблящем режиме,
микротоковая терапия, неигольчатый RF,
ультразвуковая терапия (фонофорез) и т.п.)

**EsteFILL Revital + аппаратная методика +
аппаратная методика + аппаратная методика +
аппаратная методика + аппаратная методика +
аппаратная методика + EsteFILL Revital +
EsteFILL Revital + EsteFILL Revital**



Показания:

- Хроностарение;
- Потеря тургора и эластичности кожи;
- Признаки дерматопороза;
- Обезвоженная кожа.

Протокол 6

FORMULA OF YOUTH

«ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ»



Протокол:

1. EsteFILL Revital чередуется со стимулятором коллагеногенеза (объем препарата 5 мл, игла 30-32 G, техника-бугорковая по связкам/ канюльная техника) (по 3 сессии через 14 дней) или
2. EsteFILL Revital 2 процедуры с интервалом 14 дней, через 14 дней высокосфокусированный УЗ HIFU, через 14 дней EsteFILL Revital, затем через 14 дней Микроигольчатый RF и завершает EsteFILL Revital через 14 дней



Техники введения:

Бугорковая техника/ микропапульная/ по точкам.

Интервал:

- 4 процедуры EsteFILL Revital чередуется со стимулятором коллагеногенеза (3 процедуры) с интервалом 14 дней или
- 3 процедуры EsteFILL Revital с интервалом 14 дней, затем 1 аппаратная процедура в классической методике в зависимости от аппарата через 14 дней и заключительная процедура EsteFILL Revital через 14 дней

Базовый протокол работы с возрастными изменениями кожи для подготовки к дальнейшей инъекционной и аппаратной стимуляции коллагеногенеза.

**EsteFILL Revital + стимулятор коллагеногенеза +
EsteFILL Revital + стимулятор коллагеногенеза +
EsteFILL Revital + стимулятор коллагеногенеза +
EsteFILL Revital**

или

**EsteFILL Revital + EsteFILL Revital + EsteFILL Revital +
аппаратная процедура (высокосфокусированный УЗ
HIFU /Микроигольчатый RF) + EsteFILL Revital**



или



Показания:

- Хроностарение;
- Потеря тургора и эластичности кожи;
- Признаки дерматопороза;
- Обезвоженная кожа;
- Стимуляция коллагеногенеза;
- Восполнение гидрорезерва кожи;
- Противовоспалительное действие.

Протокол 7

SHINING IMAGE

«СИЯЮЩИЙ ОБРАЗ»

Лечение купероза (Эритематозно-телеангиэктатическая форма розацеа):

Процедура показана лицам с признаками купероза и эритематозно-телеангиэктатической формой розацеа для комплексной коррекции проявлений основного заболевания.

**Лазерная коагуляция сосудов + EsteFILL Revital +
EsteFILL Revital + EsteFILL Revital + EsteFILL Revital**



Протокол:

Первым этапом проводится процедура биоревитализации EsteFILL Revital, через 7-14 дней лазерная коагуляция сосудов. Затем, через 7 дней после окончания курса лазерной коррекции и минимизации сосудистого рисунка, проводится курс «EsteFILL Revital» 2 сессии.



Техники введения:

По точкам/канюльная

Интервал:

EsteFILL Revital 1 сессия для восполнения гидрорезерва кожи, через 7-14 дней – процедура лазерной коагуляции сосудов. После лазерной коагуляции через 7 дней проводится 2 процедуры EsteFILL Revital с интервалом 2 недели.

Показания:

- Купероз, розацеа (эритематозно-телеангиэктатическая форма);

Протокол 8

SMART- ПЕРЕЗАГРУЗКА

Коррекция атрофических рубцов – сочетание лазеров, «EsteFILL Revital» и PRP/PRGF.

Процедура показана лицам с атрофическими и гипотрофическими рубцами для комплексной коррекции проявлений основного заболевания. Сочетает инъекции EsteFILL Revital в сочетании с аблятивным лазерным воздействием по схеме



Протокол:

- Первым этапом локально в проекции рубца (рубцов) проводится инъектирование EsteFILL Revital.
- Затем вторым этапом через 14 дней проводится сеанс абляционного фракционного лазерного воздействия (CO2 лазер, эрбиевый лазер).
- Третьим этапом после полного заживления кожи (через 14-21 день) проводится 2 процедуры плазматерапии (PRP/PRGF), чередуя с процедурой биоревитализации. Курс по 2 процедуры с интервалом 2 недели.



Техники введения:

Субцизия (сепарация) рубца (игла 30G/27G в зависимости от локализации и характеристик рубца), единичные вколы.

Интервал:

- Рекомендуемый интервал между введением EsteFILL Revital и аблятивным лазерным воздействием – 14 дней.
- После полного заживления кожи (14-21 день) проводится курс из 2 процедур плазматерапии (PRP/PRGF), чередуя с 3-5 процедур биоревитализации с интервалом 2 недели.

EsteFILL Revital + аблятивное лазерное воздействие + PRP/PRGF + EsteFILL Revital + PRP/PRGF + EsteFILL Revital



Показания:

- Лечение атрофических и гипотрофических рубцов.

Протокол 9

EXPRESS RECOVERY

«ЭКСПРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ»



Применения EsteFILL Revital в рамках реабилитации после пластических операций



Протокол:

Через 14 дней после пластической операции 3 сессии EsteFILL Revital в чередовании введением плазмы, обогащенной тромбоцитами и факторами роста, с интервалом 2 недели.



Техники введения:

Микропапульная, бугорковая, единичные вколы

Интервал:

После пластических операций: через 14 дней после операции - инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами и факторами роста чередуются с процедурой ревитализации EsteFILL Revital. Курс 3 сессии PRP/PRGF и 3 сессии EsteFILL Revital с интервалом 2 недели.

Протокол предназначен для более гладкого течения периода реабилитации после оперативного вмешательства в области лица, шеи и зоны декольте.

Пластическая операция + PRP/PRGF + EsteFILL Revital + PRP/PRGF + EsteFILL Revital + PRP/PRGF + EsteFILL Revital



Показания:

- Реабилитационный период после пластических операций.

Протокол 10

SILK HANDS

«ШЕЛКОВЫЕ РУЧКИ»



Протокол для коррекции тыльной поверхности кистей рук в сочетании с коррекцией утраченных объемов.



Протокол:

EsteFILL Revital 2 процедуры с интервалом в 4 недели, EsteFILL Soft/Medium 1 сессия между процедурами биоревитализации (1-1,5 мл на кисть).



Техники введения:

бугорковая, канюльная 25G (EsteFILL Revital), канюльная 22G (EsteFILL Soft/Medium).

Интервал:

Введение EsteFILL Revital, затем введение EsteFILL Soft/Medium и EsteFILL Revital с интервалом 2 недели.

Протокол предназначен для коррекции сухости, стянутости, пигментации и потери упругости кожи тыльной поверхности кистей рук, для коррекции возрастных проявлений в области тыла кистей рук и восполнения утраченных объемов.

EsteFILL Revital + EsteFILL Soft/Medium + EsteFILL Revital



Показания:

- Дряблая тонкая кожа;
- Тонкая жировая прослойка;
- Заметный контур вен и сухожилий кистей;
- Истончение эпидермиса;
- Морщины и пигментация;
- Потеря упругости кожи;
- Сухость, стянутость кожи;
- Восстановление после воздействия внешних факторов (зимний период, активная инсоляция и тд).

Протокол 11

NATURAL RADIANCE

ЕСТЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ

Процедура для улучшения качества кожи,
решения проблемы гравитационного птоза

EsteFILL Revital + EsteFILL Revital + EsteFILL Medium



Протокол:

EsteFILL Revital 2 процедуры с интервалом в 3 недели, EsteFILL Medium 1 процедура векторного лифтинга (1 мл на сторону)



Техники введения:

Папулярная, канюльная 22G (EsteFILL Revital), канюльная 22G (EsteFILL Medium)

Интервал:

EsteFILL Revital 2 процедуры с интервалом в 3 недели, EsteFILL Medium 1 процедура.

Показания:

- Дряблая тонкая кожа;
- Тонкая жировая прослойка;
- Морщины и пигментация;
- Потеря упругости кожи;
- Сухость, стянутость кожи;
- Восстановление после воздействия внешних факторов (зимний период, активная инсоляция и тд).

Протокол 12

SILK EFFECT

ЭФФЕКТ ШЕЛКА

Процедура для улучшения качества кожи, коррекции «Кольца Венеры»

EsteFILL Revital + EsteFILL Revital + EsteFILL Soft



Протокол:

EsteFILL Revital 2 процедуры с интервалом в 3 недели, EsteFILL Soft 1 процедура – коррекция морщин шеи.



Техники введения:

Папулярная, канюльная – канюля 25G/игла 30G (EsteFILL Revital), канюльная/линейно-ретроградная - канюля 25G/игла 30G (EsteFILL Soft)

Интервал:

EsteFILL Revital 2 процедуры с интервалом в 3 недели, EsteFILL Soft 1 процедура

Показания:

- Дряблая тонкая кожа;
- Тонкая жировая прослойка;
- Морщины «кольца Венеры»;
- Потеря упругости кожи;
- Сухость, стянутость кожи;
- Восстановление после воздействия внешних факторов (зимний период, активная инсоляция и тд).

Комбинированные протоколы сочетания EsteFILL с другими инъекционными методиками



Контурная пластика

EsteFILL Revital и филлеры ГК EsteFILL Soft, Medium, Ultra сочетаются в одну процедуру. Далее через 2 недели после комбинированной методики проводятся повторные сессии EsteFILL Revital курсом 2-3 процедуры с интервалом 3-4 недели.



Коллагеностимуляция

препаратами полимолочной кислоты и гидроксипатита кальция в разведении. Рекомендуется проведение курса EsteFILL Revital 4 сессии с интервалом 3-4 недели перед данными процедурами.



Нитевая имплантология (тредлифтинг)

сочетаются с EsteFILL Revital в одну процедуру. Процедуры «EsteFILL Revital» можно проводить курсом 3-4 сессии с интервалом 2 недели до или после установки нитей.



Ботулинотерапия

Рекомендуется проведение курса EsteFILL Revital 4 сессии с интервалом 3-4 недели перед ботулинотерапией. При проведении ботулинотерапии в технике «microbotulinum» в рамках лечения дерматозов (акне, розацеа, эритрофобия), а также при коррекции мелкоморщинистого типа старения, возможно инъекционное введение EsteFILL Revital в одну процедуру с ботулиническим нейропротеином.



Коллагенотерапия

сочетается с EsteFILL Revital в одной процедуре, при условии инъекций коллагена и ревитализанта в разные точки. Курс 4 сессии с интервалом 3-4 недели.





Плазматерапия

Плазма, обогащенная тромбоцитами и факторами роста. Возможно сочетание с EsteFILL Revital в одну сессию при введении по разным точкам.

Точки введения EsteFILL Revital

1. Латеральный конец брови
2. Скуловая точка (середина линии, проведенной от наружного угла глаза к козелку уха)
3. На 0,5 см впереди от козелка
4. Точка Хиндерера
5. Модииолус или в углубление под уголком рта
6. Мандибулярная связка (пересечение губоподбородочной складки и края нижней челюсти)
7. Угол нижней челюсти
8. Граница роста волос (по темпоральному гребню)
9. На 2/5 расстояния между серединой брови и в/ч головы
10. Середина подбородка и середина расстояния между краем нижней губы и подбородком

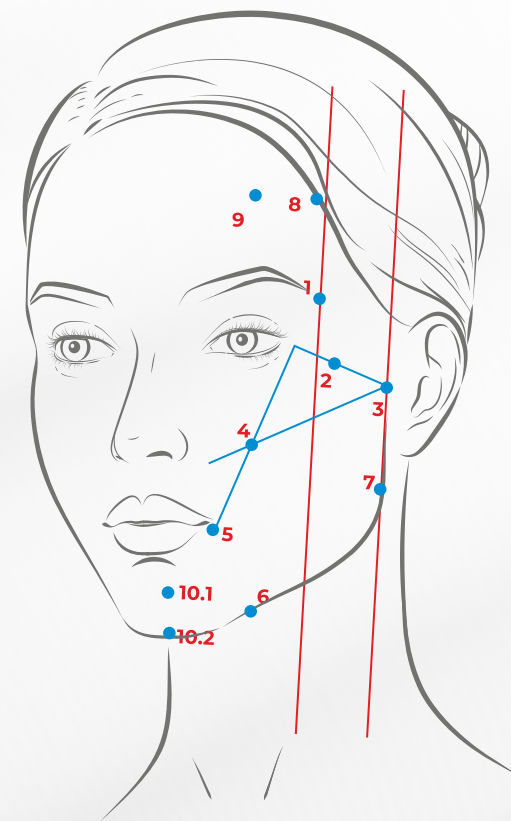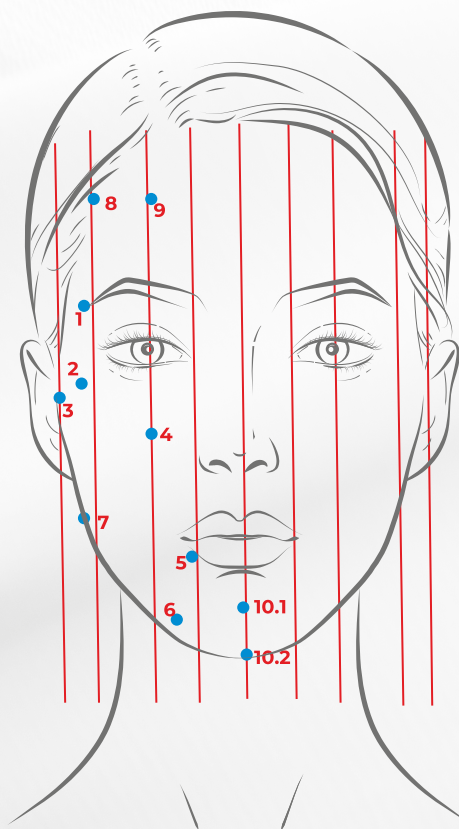

В каждую точку вводим 0,1 мл препарата EsteFILL Revital
в технике микроболюса на глубину 3-4 мм.

БИОРЕВИТАЛИЗАНТ EsteFILL Revital

Концентрация ГК:

15 мг/мл

Молекулярная масса ГК:

3,0±0,3 млн. Дальтон

Высокомолекулярная кислота 70%

Низкомолекулярная 30%

Объем:

2 мл

Рекомендуемая игла:

30G ½

Длительность деградации:

1-2 мес

Глубина введения:

поверхностный и средний слой дермы.

Техники введения:

линейная ретроградная, веерная, коротколинейная, микроболусы (бугорковая), канюльная.

Области введения:

кожа лица, шеи, декольте, тыльная поверхность кистей рук, кожа тела



Ревитализант пролонгированного действия, содержащий высокомолекулярную и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту

Показания:

- фото- и хроностарение лица, шеи, области декольте и рук;
- регидратация кожи;
- коррекция атрофических рубцов;
- пролонгация действия филлеров на основе гиалуроновой кислоты;
- применение между курсами лазерной терапии
- комплексная коррекция атрофических рубцов.

EsteFILL Soft

Концентрация ГК:

18 мг/мл

Молекулярная масса ГК:

3-4 млн. Дальтон.

Объем:

1 мл

Рекомендуемая игла:

30G ½

Длительность деградации:

5-7 мес

Глубина введения:

поверхностный и средний слой дермы, подслизисто.

Техники введения:

линейная ретроградная, веерная, коротколинейная, микроболюсы (бугорковая), канюльная.

Области введения:

кожа лица, шеи, декольте, тыльная поверхность кистей рук, кожа тела



Стабилизированная высокомолекулярная гиалуроновая кислота, мягкий филлер.

Показания:

- тонкие поверхностные морщины лба;
- периорбитальные и периоральные морщины;
- коррекция слезной борозды;
- подкожная поверхностная коррекция зоны виска;
- тонкие горизонтальные морщины шеи;
- коррекция контура губ;
- армирование кожи лица, шеи, декольте и любых других участков тела.

EsteFILL Medium

Концентрация ГК:

24 мг/мл

Молекулярная масса ГК:

3-4 млн. Дальтон.

Объем:

1 мл

Рекомендуемая игла:

27G (30G) ½

Длительность деградации:

7-12 мес

Глубина введения:

средний и глубокий слой дермы, подслизисто, подкожно, на надкостницу.

Техники введения:

линейная ретроградная, веерная, коротколинейная, микроболюсы (бугорковая), канюльная.

Области введения:

кожа лица, тыльная поверхность кистей рук, кожа тела.



Стабилизированная высокомолекулярная гиалуроновая кислота, филлер средней плотности.

Показания:

- глубокие горизонтальные морщины лба;
- неглубокие межбровные складки;
- носогубные складки;
- губоподбородочные складки;
- воссоздание объема медиальной части щеки;
- коррекция контура и объема губ;
- коррекция тыла кистей рук;
- векторный лифтинг для создания деликатных объемов (лобная, височная, щечно-скуловая зоны).

EsteFILL Ultra

Концентрация ГК:

25 мг/мл

Молекулярная масса ГК:

3-4 млн. Дальтон.

Объем:

1 мл

Рекомендуемая игла:

27G ½

Длительность деградации:

10-12 мес

Глубина введения:

глубокие слои дермы, подкожно, на надкостницу.

Техники введения:

линейная ретроградная, веерная, канюльная, супраперостальная.

Области введения:

лицо, в/ч головы, кожа тела.



Стабилизированная высокомолекулярная гиалуроновая кислота,
филлер высокой плотности.

Показания:

- глубокие носогубные и губоподбородочные складки;
- объёмно-контурное моделирование скуловой зоны;
- объёмно-контурное моделирование углов нижней челюсти;
- объёмно-контурное моделирование подбородка;
- височная зона (инъекционный темпоральный лифтинг);
- мочки ушей.

Рекомендации по выбору препарата и инструмента для инъекций при коррекции разных зон лица

1. Лобные морщины – «EsteFILL Soft», «EsteFILL Medium», игла\канюля.
2. Скелетизация надбровных дуг – «EsteFILL Medium», канюля.
3. Виски – «EsteFILL Soft», «EsteFILL Medium», канюля, «EsteFILL Ultra», игла (канюля в в/ч головы).
4. Межбровные складки – «EsteFILL Medium», игла.
5. Зона орбиты - «EsteFILL Soft», игла, канюля.
6. Нососкуловая борозда – «EsteFILL Medium», «EsteFILL Ultra», игла\канюля.
7. Носогубная складка – «EsteFILL Medium», «EsteFILL Ultra», игла\канюля.
8. Морщины на щеках – «EsteFILL Medium», «EsteFILL Soft», игла.
9. Морщины вокруг губ – «EsteFILL Soft», игла.
10. Складки «скорби» - «EsteFILL Medium», «EsteFILL Ultra», канюля.
11. Губоподбородочная морщина – «EsteFILL Ultra», игла\канюля.
12. Линия овала лица, включая подбородок, углы нижней челюсти – «EsteFILL Ultra», игла\канюля.
13. Височный лифтинг – «EsteFILL Ultra», канюля.
14. Кисти рук – «EsteFILL Medium», канюля.
15. Уголки губ (область комиссуры губ) - «EsteFILL Medium», игла\канюля.

Протоколы использования филлеров EsteFILL:

Филлеры EsteFILL прекрасно сочетаются в одну процедуру между собой в рамках одной зоны и в разные зоны лица (FullFace):


Височная зона -

использование EsteFILL Soft для подкожного введения в лицевой части височной зоны и EsteFILL Ultra в в/ч головы в проекции латерального височного жира (инъекционный темпоральный лифтинг).




Скулощечная-зона -

использование EsteFILL Medium для коррекции нососкуловой (носощечной) борозды и восстановление объема медиального щечного жирового компартмента и использование EsteFILL Ultra для объемно-контурного моделирования латеральной части скулы.

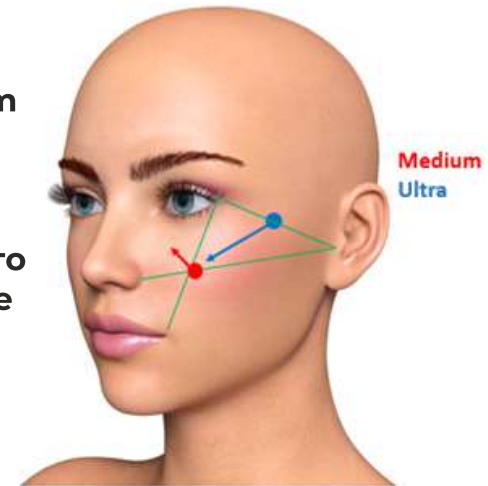

Носогубные и губоподбородочные складки -

использование в технике сэндвич EsteFILL Medium или Ultra субдермально и EsteFILL Soft интрадермально (для коррекции дермальных морщин).

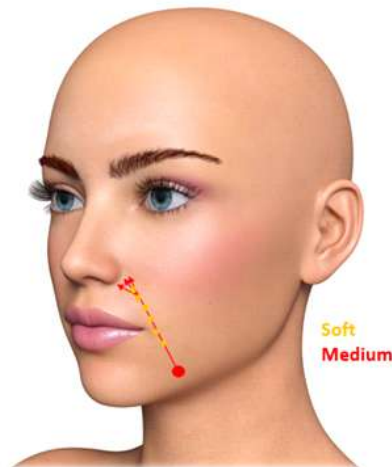

Губы и кисетные морщины -

использование EsteFILL Medium для воссоздания объема губ и EsteFILL Soft для коррекции контура и кисетных морщин.

