

Протокол bioGEL GREEN

СОСТАВ:

- Гиалуроновая кислота 1%
- Трегалоза 1%
- Аминокислоты (Глутатион, Гидроксипролин, Лизин, Валин, Глицин)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

лицо, шея, декольте, руки, тело, интимные зоны

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- обезвоживание кожи
- выраженные возрастные изменения
- глубокие мимические и статические морщины
- истончение дермы
- подготовка и реабилитация после агрессивных методик (химические пилинги, лазерная шлифовка и пр.)

ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- папульно
- микропапульно
- линейно-ретроградно

Рекомендуется использовать иглы 30G 4mm/6mm, мезороллер или дермапен.


ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА:

Трегалоза 1% – прорыв в герантологии, удостоенный Нобелевской премии. Трегалоза активизирует процесс аутофагии, помогая утилизации поврежденных органелл. Трегалоза защищает ГК от быстрого распада в тканях, что позволяет продлить ее эффекты в коже. В bioGEL Green используется высокая концентрация трегалозы, что позволяет достичь видимых результатов уже после первого применения.

Гиалуроновая кислота 1%

Несшитая, низкомолекулярная, неживотного происхождения.


Молекулярный вес ГК – 1100-1300 кДа.

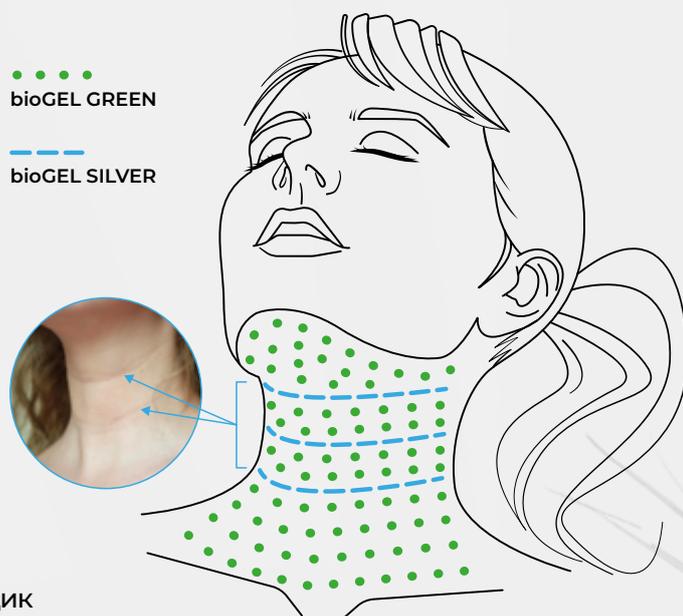

Рекомендуемый расход на процедуру:

Silver – 2-2,5 мл

Green – 2-2,5 мл

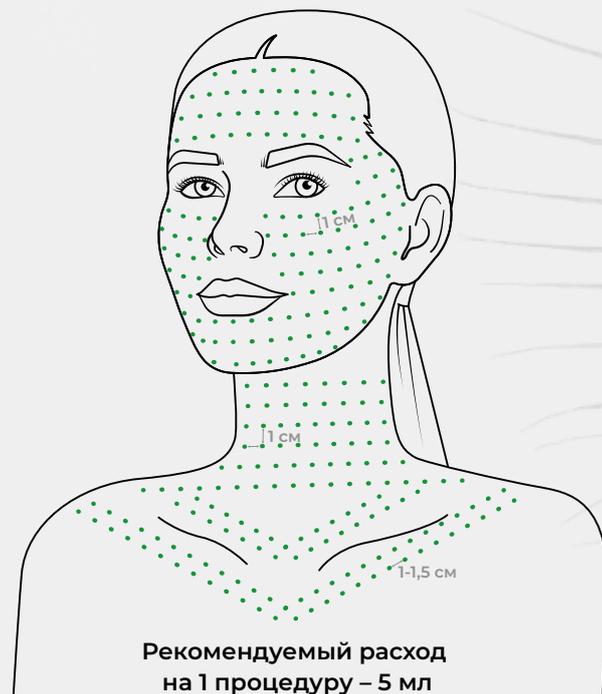

Рекомендуемый расход
на 1 процедуру – 5 мл