

Проблемой большинства косметологических технологий, направленных на омоложение кожи, является то, что они сфокусированы преимущественно на области лица. Как результат, мы наблюдаем пациентов с **молодым лицом, но с кистями, руками, телом с явными признаками старения.**


*Desmond Fernandes, Oral Maxillofacial Surg
Clin N Am. 2005, 17:51-63 2005 Elsevier Inc.*



PERFOSKIN
Device


Схема сборки Perfoskin



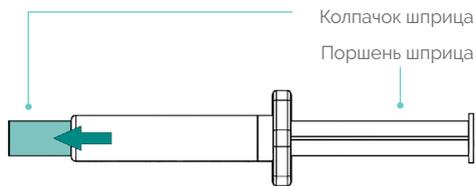

Колпачок шприца

Поршень шприца

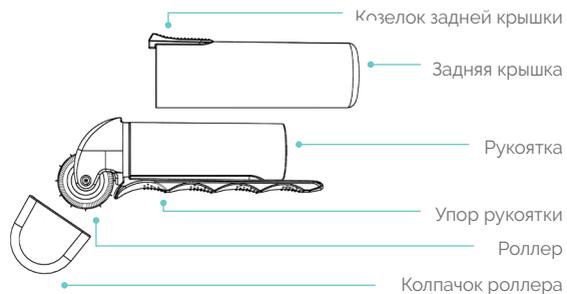

Крышечка задней крышки


Задняя крышка

Рукоятка


Упор рукоятки

Роллер


Колпачок роллера

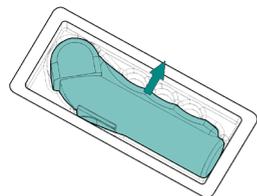


1 Убедиться в целостности упаковки, затем вскрыть блистер, извлечь из него Perfoskin Device.

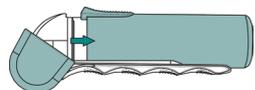


2 Мягким движением потянуть защитную крышку Perfoskin Device.

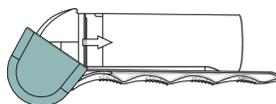


3 Perfoskin Device без задней части прибора положить на подготовленный манипуляционный стол (на стерильную поверхность).

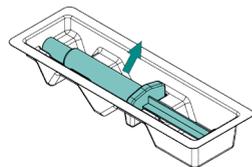


4 Убедиться в целостности упаковки, затем вскрыть блистер с Perfoskin Prederm, извлечь шприц.

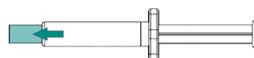


5 Снять защитный колпачок со шприца.

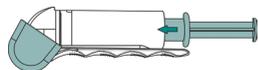


6 Вставить шприц в Perfoskin Device.

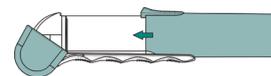


7 Одеть заднюю часть на Perfoskin Device.

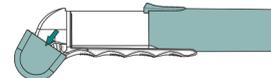

8 Снять защитный колпачок с головки Perfoskin Device.

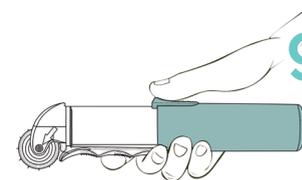

9 Проверить работу Perfoskin Device, мягко нажимая на заднюю поверхность, при этом со шприца выйдя небольшое количество содержимого.

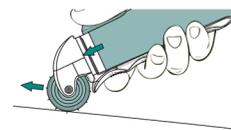

10 Perfoskin Device готов к проведению процедуры. Проводить процедуру нужно одновременно нажимая на заднюю часть прибора и проводя роллером по поверхности кожи.