



FILLERS

COLLAGEN

PDRN

GLUTATHIONE

DMAE

SUCCINATE

MANNITOL

TREHALOSE



BEPHARM
профессиональная медицина

+7(495)125-12-15
www.bepharm.ru

Jufora®

ФИЛОСОФИЯ JUFORA®

CLEAR

Тщательный контроль производства от входящего сырья до выхода готовой продукции. Мы верим в то, что потребитель имеет полное право знать, как и из чего делается продукт.

SMART

Наука, факты и доказательная медицина вселяют в сердца наших потребителей уверенность в эффективности препаратов. Подтвержденные методы, исследования и доказательства — основные приоритеты.

CARE

Стремление создавать безопасный продукт — неотъемлемая часть внутренней философии и ДНК компании. Главный принцип медицины — «не навреди» — является для нас догмой.





КРАСОТА — ЭТО *мбл*
ТЕХНОЛОГИИ — ЭТО МЫ.

SIGMA LABORATORIES

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

JUFORA®

— первый собственный бренд Sigma Laboratories — научно-производственного предприятия на базе Инновационного центра «Сколково». Мы разрабатываем, прототипируем и запускаем в серийное производство изделия на основе биополимеров. Собственные производственные площадки и R&D лаборатория.

НАПРАВЛЕНИЯ

Продукция компании используется в таких областях как общая хирургия, артрология, онкология, урология, офтальмохирургия, а также эстетическая медицина (биоревитализанты, пилинги, филлеры).



Производство по стандартам
GMP и ISO 13485.*

Ежегодный аудит.
Система менеджмента качества.

1000 м²

чистых помещений класса ISO 7
и 100 видов научно-исследовательского оборудования.



>2000 м²


общая площадь, включая научно-исследовательские лаборатории.

>130 человек
команда

>10 стран мира
присутствие

SIGMA LABORATORIES

— это научная и клиническая доказательные базы. Постоянные лабораторные и клинические исследования на готовых продуктах. 1 500 000 единиц в год выпускаемой продукции в шприцах и во флаконах. Десятки тысяч довольных докторов и косметологов.

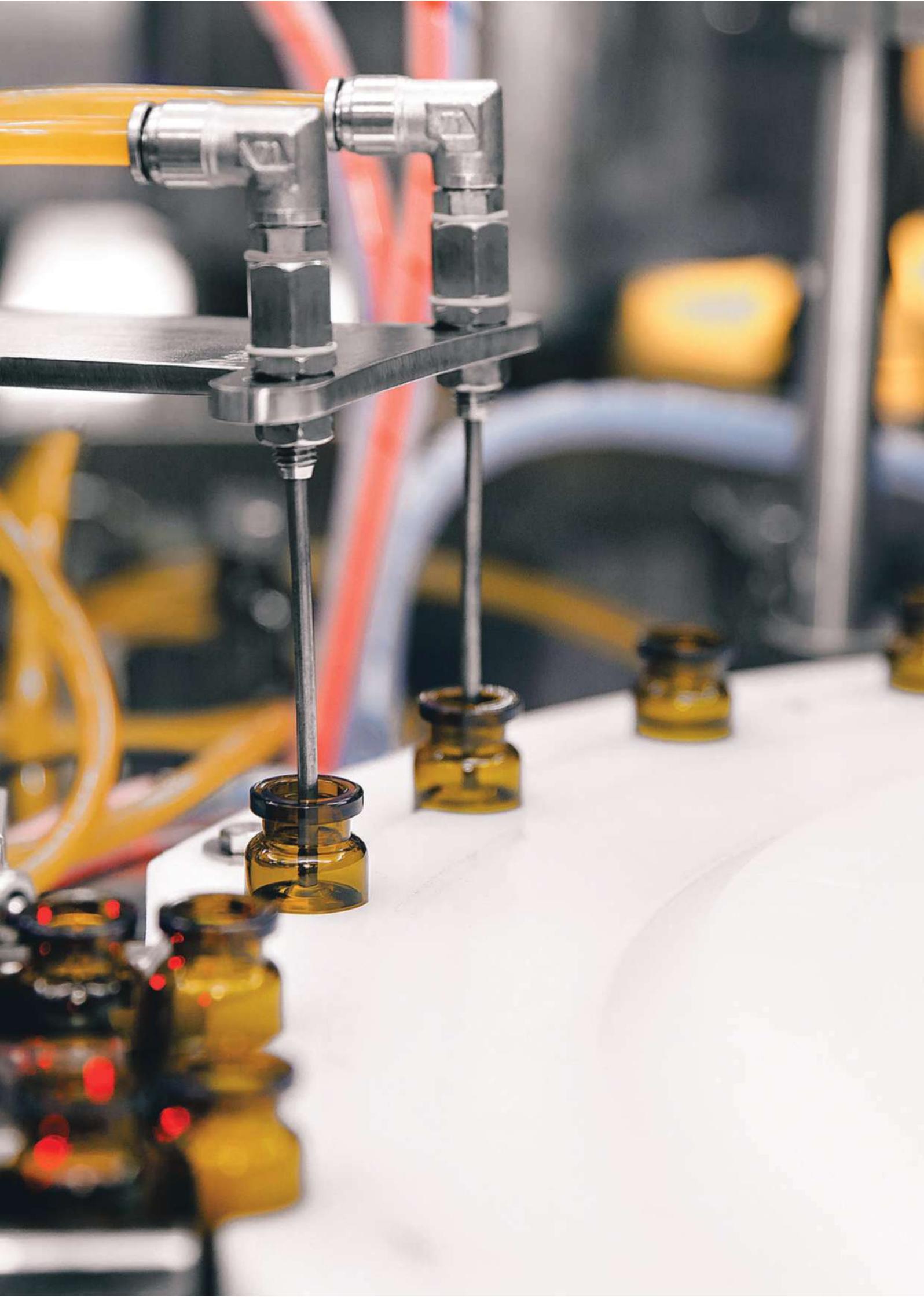

SUCCINATE + MANNITOL + GLUTATHIONE



use manual

Hyaluronic Acid – 0.8%
SUCCINATE – 1.6%
MANNITOL – 0.5%
GLUTATHIONE – 0.5%

ОБЪЕМ 6,5 мл.

РН – от 7,0 до 7,6

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- осветление кожи на 1-2 тона;
- нивелирование отека и воспаления;
- осветление зон гиперпигментации;
- удаление застойных пятен;
- уплотнение кожи;
- восстановление тонуса кожи;
- восстановление гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- повышение степени переносимости кожей травмирующих процедур.

ПОКАЗАНИЯ

- Усталый, деформационно-отечный, смешанный типы старения;
- Признаки раннего старения кожи, профилактика хроно- и фотостарения;
- Снижение гидратации дермы легкой степени;
- Профилактика поствоспалительной гиперпигментации;
- Постакне в виде застойных пятен;
- Гиперпигментация различного генеза;
- Отечность лица и зоны вокруг глаз;
- Усталая кожа;
- При длительном приеме лекарственных ср-в;
- «Синева», «темные круги» под глазами;
- Явление купероза;

ВРЕМЯ СТОЯНИЯ ПАПУЛ – 6-12 часов

ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

- интрадермально папульно или микропапульно;
- субдермально болюсно в проекции лимфатических узлов;
- напаж.

- Обезвоженная кожа;
- «Кожа курильщика», «серый» цвет лица;
- Подготовка к инсоляции и реабилитация после;
- Восстановление после соматических, инф. заболеваний (грипп, COVID-19 и др., длительное нахождение в стационаре);
- Атоничная кожа;
- Профилактика аномального рубцевания у молодых рубцов (через 3 недели после появления);
- Подготовка и реабилитация к травмирующим процедурам и хирургии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **минимальный** рекомендуемый монокурс – 4 процедуры с интервалом 10 дней;
- 1-2 процедуры **в составе смешанного курса**;
- **профилактические/ поддерживающие** процедуры – однократно, интервал – 3 мес.



PDRN 8%



use manual

Hyaluronic Acid – 1.0%
PDRN – 8%

ОБЪЕМ 6,5 мл.

РН – от 7,0 до 7,6

PDRN 8%

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- нивелирование воспалительных элементов и проявлений воспалительного процесса;
- восстановление тонуса кожи;
- восстановление гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- повышение степени переносимости кожей травмирующих процедур;
- ускорение реэпителизации кожи;
- повышение качества и скорости наступления результата после травмирующей процедур;
- опосредованный лифтинг.

ПОКАЗАНИЯ

- Деформационно-отечный, мускульный, мелко-морщинистый, смешанный типы старения;
- Профилактика фотостарения;
- Снижение гидратации дермы легкой степени;
- Профилактика поствоспалительной гиперпигментации;
- Явления купероза;
- Истонченная кожа;
- Обезвоженная кожа;
- Кожа с явлениями воспалительного характера (гиперемия, высыпания), расширенные поры;
- «Кожа курильщика»;
- Восстановление после инфекционных заболеваний (грипп, COVID-19 и др.);

ВРЕМЯ СТОЯНИЯ ПАПУЛ – 10-18 часов

ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

- интрадермально папульно или микропапульно;
- субдермально болюсно в проекции лимфатических узлов;
- напаж.

- Повышение регенераторного потенциала кожи;
- Повышение адаптационных возможностей кожи;
- Атоничная кожа;
- Профилактика аномального рубцевания у молодых рубцов (через 3 недели после появления);
- Подготовка к травмирующим процедурам и хирургии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **минимальный** рекомендуемый монокурс – 3 процедуры с интервалом от 14 дней до 2 месяцев;
- 1-2 процедуры **в составе смешанного курса**;
- **профилактические/ поддерживающие** процедуры – однократно в квартал.



MESO | JUFORA®

SUCCINATE + PDRN



use manual

Hyaluronic Acid – 1.0%
SUCCINATE – 1.6%
PDRN – 4%

ОБЪЕМ 6,5 мл.

РН – от 7,0 до 7,6

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- осветление кожи на 1 тон;
- нивелирование явления отека и воспаления;
- осветление зон гиперпигментации;
- снижение гиперемии при куперозе и розацеа;
- удаление застойных пятен, уплотнение кожи;
- восстановление тонуса кожи, восстановление гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- ускорение реэпителизации кожи;
- повышение качества и скорости наступления результата после травмирующих процедур;
- опосредованный лифтинг.

ПОКАЗАНИЯ

- Мелкоморщинистый, деформационно-отечный, мускульный, смешанный типы старения;
- Трихология;
- Профилактика фотостарения;
- Снижение гидратации легкой и средней степени;
- Профилактика поствоспалительной гиперпигментации;
- Поставке в виде застойных пятен, рубцовых элементов;
- «Молодые» стрии;
- Усталая кожа;
- Воспалительные явления, расширенные поры;
- Явление купероза, розацеа;
- Обезвоженная кожа;

ВРЕМЯ СТОЯНИЯ ПАПУЛ – 16-24 часа

ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

- интрадермально папульно или микропапульно;
- субдермально болусно в проекции лимфатических узлов или линейно;
- напаж.

- Истонченная кожа;
- Атоничная кожа;
- Подготовка к инсоляции и реабилитация после;
- «Серый» цвет лица; «Кожа курильщика»;
- Восстановление после соматических, инф. заболеваний (грипп, COVID-19 и др., длительное нахождение в стационаре);
- Гравитационный птоз 1 степени;
- Профилактика аномального рубцевания у молодых рубцов (через 3 недели после проявления);
- Подготовка к травмирующим процедурам и хирургии;
- Повышение регенераторного потенциала кожи;
- Повышение адаптационных возможностей кожи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **минимальный** рекомендуемый монокурс – 3 процедуры с интервалом от 14 дней до 2 месяцев;
- **однократно в составе смешанного курса;**
- **профилактические/ поддерживающие** процедуры – однократно в квартал.





Jufora

+ SUCCINATE
+ PDRN

6,5 ml

COLLAGEN HT 1%

РЕКОМБИНАНТНЫЙ КОЛЛАГЕН
III ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТИПА



use manual

Hyaluronic Acid — 1.0%
COLLAGEN TYPE III (COL3) — 1.0%

ОБЪЕМ 6,5 мл.

PH — от 7,0 до 7,6

ПОКАЗАНИЯ

- Деформационно-отечный, усталый, мелкоморщинистый, мускульный, смешанный типы старения;
- Фото- и хроностарение;
- Снижение тонуса и эластичности кожи;
- Поддержание синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты;
- Профилактика инволюционных изменений;
- Растяжки на теле;
- Провисание и потеря формы лица;
- Гипертрофические и атрофические рубцы (постакне, стрии, шрамы);
- Подготовка к травматичным лазерным процедурам.

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- осветление кожи на 1-2 тона;
- нивелирование отека и воспаления;
- осветление зон гиперпигментации;
- удаление застойных пятен;
- уплотнение кожи;
- восстановление тонуса кожи;
- восстановление гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- повышение степени переносимости кожей травмирующих процедур.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **минимальный** рекомендуемый монокурс — 3 процедуры с интервалом от 14 дней до 2 месяцев;
- **однократно в составе смешанного курса;**
- **профилактические/ поддерживающие** процедуры — однократно в квартал.

Целевой ген

ДНК человеческого коллагена

Носитель

плаزمид

Клетки-хозяева

дрожжевые клетки, клетки E. Coli

::

Разработка, соответствующая геному человека:

полная биосовместимость,
неиммуногенный,
низкая цитотоксичность.

::

Разработка, участвующая в месте множества связей интегринов:

сильная адгезия клеток;
способствует пролиферации,
адгезии и миграции клеток
(улучшает заживление ран).

ВРЕМЯ СТОЯНИЯ ПАПУЛ — 10-18 часов

ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

- интрадермально папульно или микропапульно;
- субдермально болюсно в проекции лимфатических узлов или линейно;
- напаж.





PDRN + DMAE

Hyaluronic Acid — 1.5%

PDRN — 4%

DMAE — 3%

ОБЪЕМ 6,5 мл.

PH — от 7,0 до 7,6

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- опосредованный лифтинг;
- разглаживание носогубных складок;
- выравнивание линии нижней челюсти при птозе 1 степени.

ПОКАЗАНИЯ

- Деформационно-отечный тип старения;
- Смешанный тип старения;
- Усталый тип старения;
- Атония мышечного каркаса;
- Ослабление связочного аппарата;
- Гравитационный птоз 1-2 степени.

ВРЕМЯ СТОЯНИЯ ПАПУЛ — 10-18 часов

ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

- интрадермально папульно или микропапульно;
- субдермально болюсно в проекции лимфатических узлов или линейно;
- напаж.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **минимальный** монокурс — 4 процедуры с интервалом 7-10 дней;
- 4 процедуры **в составе смешанного курса**;
- **профилактические** процедуры — однократно в квартал.

SUCCINATE + MANNITOL + TREHALOSE



use manual

Hyaluronic Acid – 1.5%
SUCCINATE – 1.6%
MANNITOL – 0.5%
TREHALOSE – 0.5%

ОБЪЕМ 6,5 мл.

РН – от 7,0 до 7,6

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- осветление кожи на 1 тон;
- нивелирование явлений отека и воспаления;
- осветление зон гиперпигментации, удаление застойных пятен;
- уплотнение кожи, восстановление тонуса кожи;
- восстановление гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- повышение степени переносимости кожей травмирующих процедур;
- опосредованный лифтинг;
- повышение качества и скорости наступления результата после травмирующих процедур.

ПОКАЗАНИЯ

- Мелкоморщинистый, мускульный, смешанный типы старения;
- Профилактика фотостарения;
- Снижение гидратации дермы средней и высокой степени;
- Профилактика поствоспалительной гиперпигментации;
- Постакне в виде застойных пятен, рубцовых изменений;
- Гиперпигментация различного генеза;
- Усталая кожа;
- Гравитационный птоз 1 степени;
- При длительном приеме лекарственных средств;
- Явление купероза;

ВРЕМЯ СТОЯНИЯ ПАПУЛ – 18-24 часов

ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

- интрадермально папульно или микропапульно;
- интрадермально линейно-ретроградно;
- напаж.

- Обезвоженная кожа;
- «Кожа курильщика»;
- Подготовка к инсоляции и реабилитация после;
- «Серый» цвет лица;
- Восстановление после соматических, инф. заболеваний (грипп, COVID-19 и др., длительное нахождение в стационаре);
- Атоничная кожа;
- Истонченная кожа;
- Стрии;
- Подготовка и реабилитация к травмирующим процедурам и хирургии;
- Повышение регенераторного потенциала кожи;
- Повышение адаптационных возможностей кожи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **минимальный** рекомендуемый монокурс – 4 процедуры с интервалом от 14 дней;
- 1-2 процедуры **смешанного курса**;
- **профилактические/ поддерживающие** процедуры – однократно с интервалом 3 месяца.





ZINC

Hyaluronic Acid – 1.5%
ZINC – 0.02%

ОБЪЕМ 6,5 мл.

PH – от 6,0 до 7,6

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- уплотнение, восстановление тонуса кожи;
- восстановление гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- снижение жирности кожи; сужение пор;
- сокращение количества воспалительных элементов.

ПОКАЗАНИЯ

- Мелкоморщинистый, деформационно-отечный, мускульный, смешанный типы старения;
- Профилактика фотостарения;
- Снижение гидратации дермы средней и высокой степени;
- Усталая, обезвоженная кожа;
- Подготовка к инсоляции и реабилитация после;
- «Серый» цвет лица; Атоничная, истонченная кожа;
- Жирная кожа, расширенные поры, единичные воспалительные высыпания.

ВРЕМЯ СТОЯНИЯ ПАПУЛ – 18-24 часов

ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

- интрадермально папульно или микропапульно;
- интрадермально, линейно-ретроградно;
- напаж.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **минимальный** монокурс – 4 процедуры с интервалом 14 дней;
- 1-2 процедуры **в составе смешанного курса**;
- **профилактические** процедуры – однократно с интервалом 3 месяца.



BEPHARM

+7(495)125-12-15

www.bepharm.ru