

ПРОТОКОЛЫ

REVI



REVI EYE

Концентрация ГК: 1.0 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.02 %
Техника введения: микропапульная
Область введения: периорбитальная
Рекомендуемая игла: 33G/13мм
Объем: 1 мл


Микропапульное введение препарата вдоль путей лимфотока. На каждую периорбитальную зону (в пределах костного края орбиты) вводить не более 0,3 мл препарата (верхнее и нижнее веко)



Глаза -
зеркало души

Показания:

- Темные круги под глазами
- Снижение тонуса и тургора кожи
- Морщины в периорбитальной зоне
- Коррекция периорбитальной гиперпигментации
- Подготовка кожи к блефаропластике и инвазивным процедурам и реабилитация после них

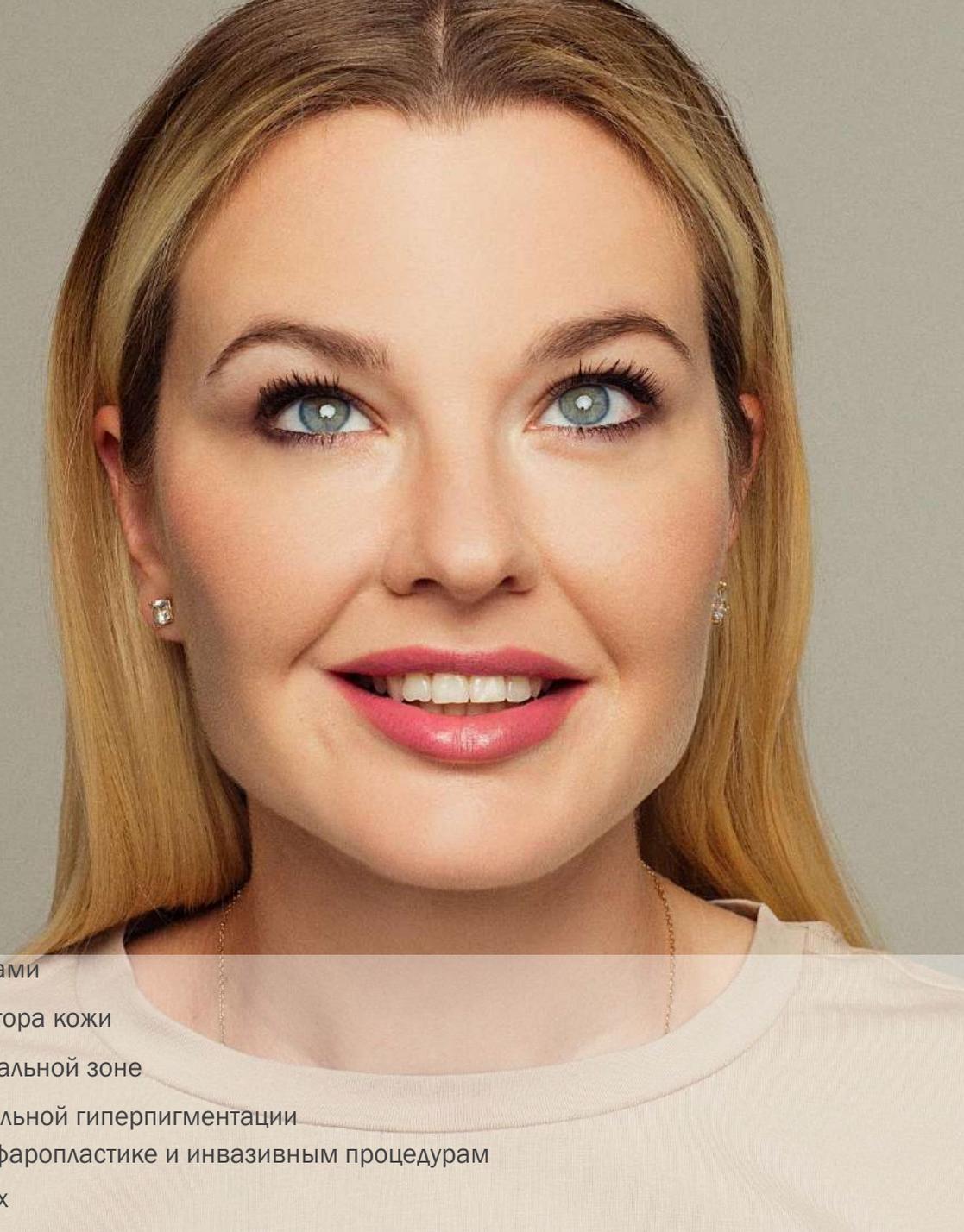


ПРОТОКОЛ YOUR EYES

● REVI EYE 1 МЛ

3 ПРОЦЕДУРЫ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

Эффекты:


- Интенсивное увлажнение
- Повышение плотности и упругости кожи
- Разглаживание мелких морщин
- Избавление от темных кругов
- Свежий, отдохнувший взгляд
- Осветление периорбитальной области

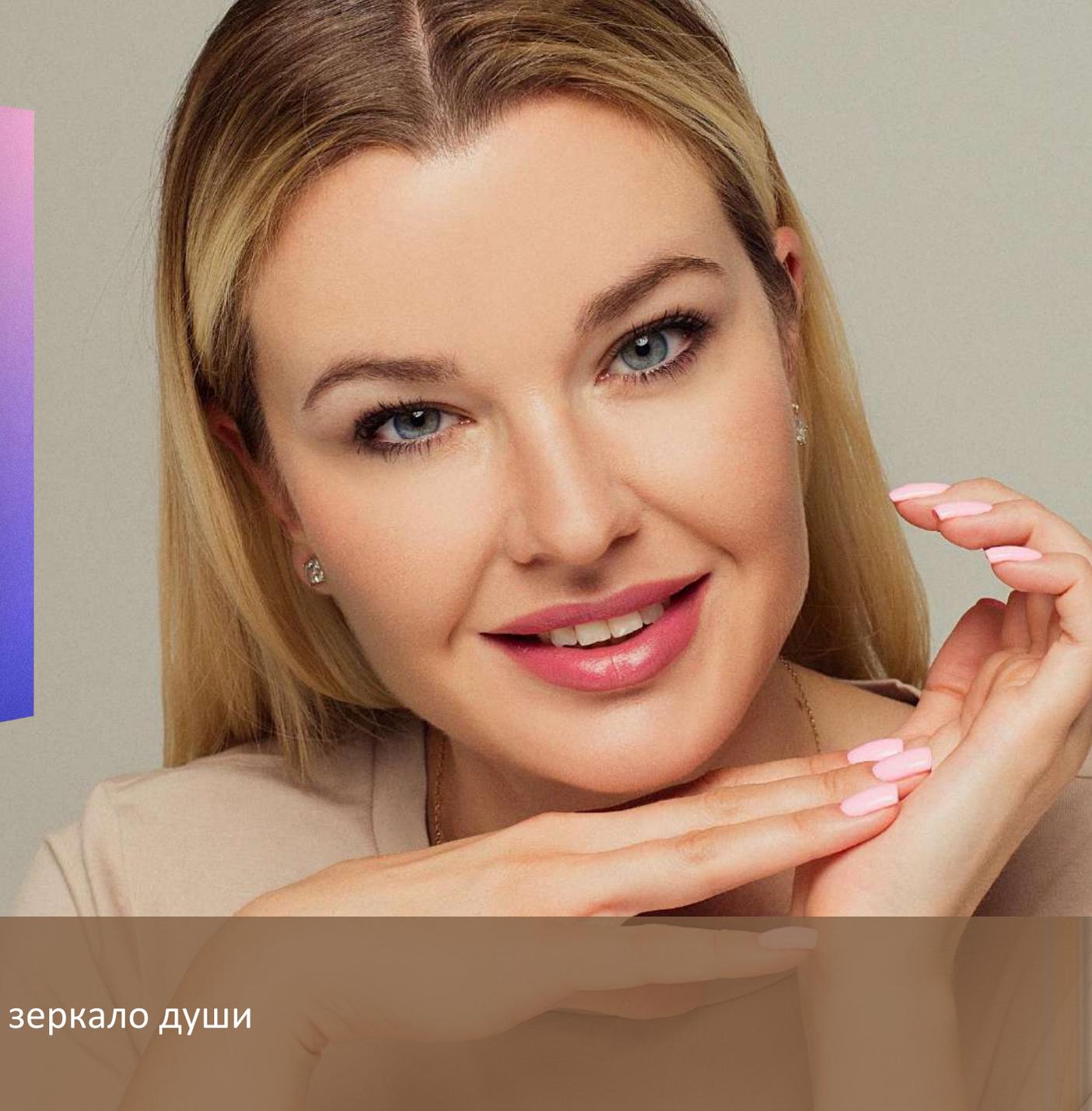

Глаза – зеркало души

ПРОТОКОЛ YOUR EYES ADVANCE

● REVI EYE 1 МЛ + ЧЕРЕЗ 10-14 ДНЕЙ БТА
1 ПРОЦЕДУРА

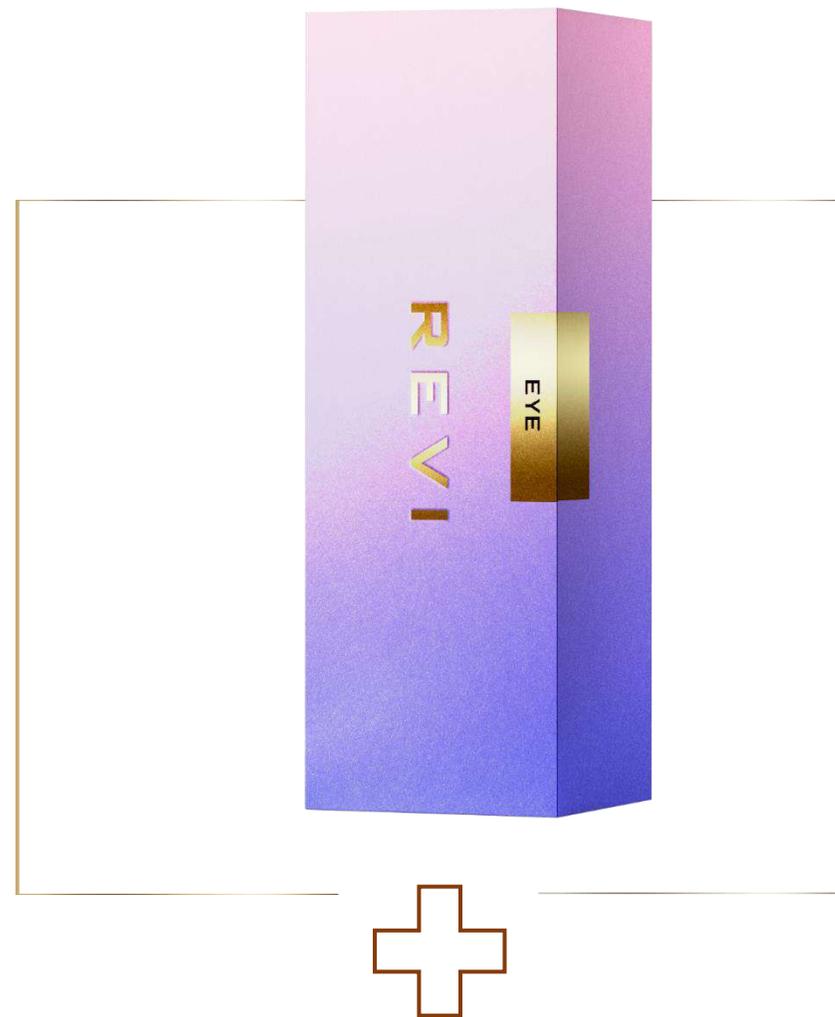

**БОТУЛИЧЕСКИЙ
НЕЙРОПРОТЕИН**

через 10-14 дней

REVI STYLE

Концентрация ГК: 1.0 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.015 %
Техника введения: бугорковая
(внутридермально, субдермально)
Рекомендуемая игла: 33G/4мм
Объем: 1 и 2 мл



*Микропапульно
(периорбитальная зона
не более 0,3 мл на каждую
сторону), бугорковая
(по всему лицу)*

*Способен сохранить
и продлить молодость кожи*

Показания:

- Профилактика первых признаков возрастных изменений кожи
- Предупреждение развития гиперпигментации, вызванной УФ излучением
- Поддержание молодости и восстановление кожи после воздействия неблагоприятных факторов (активная инсоляция, активный зимний отдых и тд.)
- Поддерживающая процедура для пролонгации эффекта от курса процедур REVI по показаниям (пигментация, розацеа и тд)
- Подготовка кожи перед другими инъекционными и аппаратными методиками



ПРОТОКОЛ FOREVER YOUNG

● REVI STYLE 2 МЛ

2 ПРОЦЕДУРЫ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

Эффекты:

- Интенсивно увлажнённая кожа
- Естественное сияние кожи
- Здоровый, ровный цвет лица
- Широкий спектр защиты клеток от негативного воздействия эндогенных и экзогенных факторов



REVI SILK


Концентрация ГК: 1.2 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.025 %
Техника введения: бугорковая
(внутридермально, субдермально)
Рекомендуемая игла: 33G/4мм
Объем: 1 и 2 мл



Идеально
для чувствительной
кожи

Показания:

- Изменения 2-3й степени по шкале Мерц, II-III типа по Глогау
- Коррекция возрастных изменений (мелкие морщины, потеря тургора и эластичности кожи)
- Обезвоженная кожа
- Гиперпигментация
- Восстановление микроциркуляции
- Купероз
- Розацеа

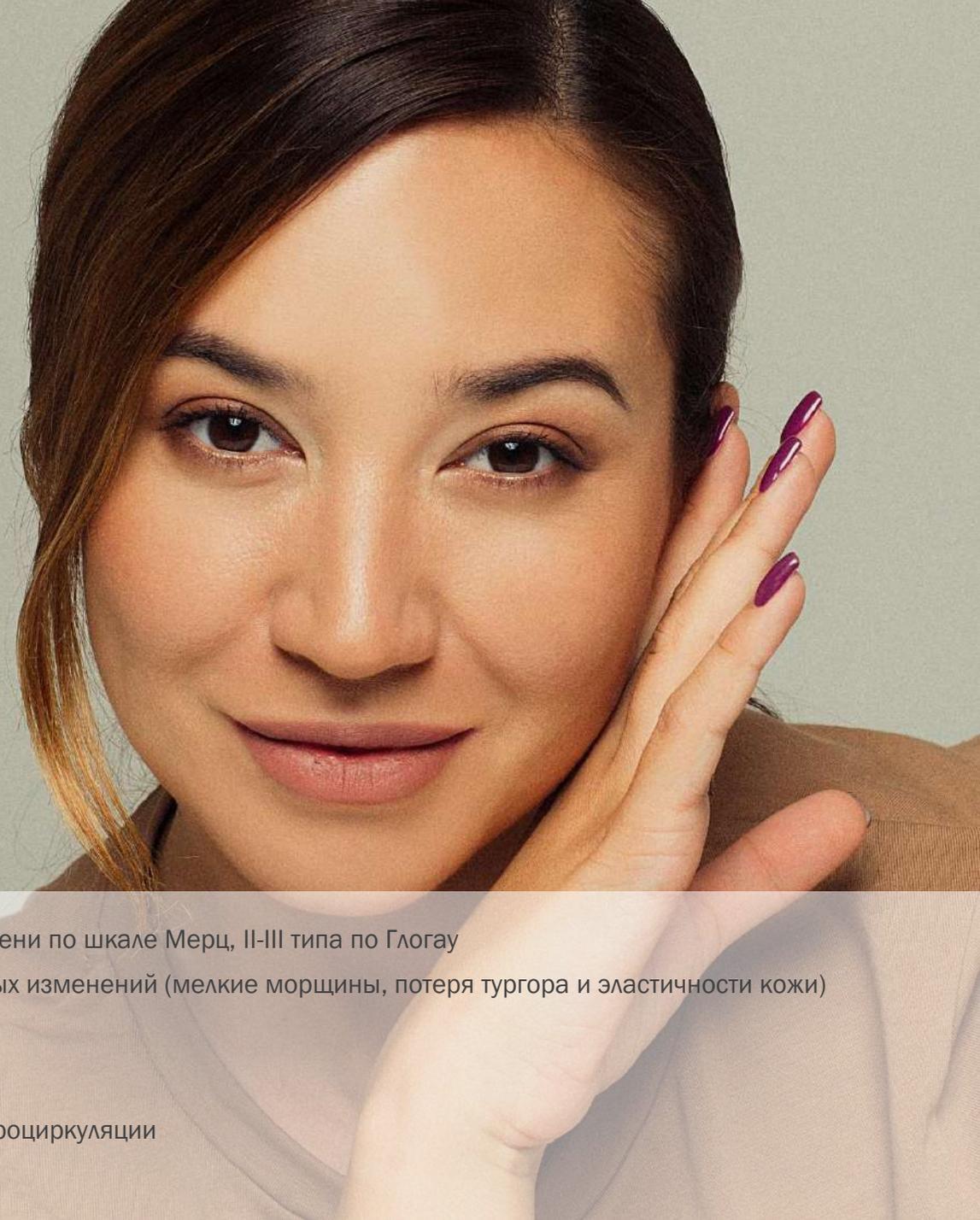

ПРОТОКОЛ SILK TOUCH

ПОКАЗАНИЯ:

КУПЕРОЗ, РОЗАЦЕА

REVI SILK 2 МЛ

3 ПРОЦЕДУРЫ РАЗ В МЕСЯЦ

Эффекты:

- Активное увлажнение кожи
- Ангиопротекторное действие
- Регуляция микроциркуляции
- Противовоспалительное действие
- Восстановление естественного барьера кожи
- Устранение проявлений купероза и розацеа
- Шелковая, сияющая кожа



ПРОТОКОЛ SILK TOUCH ADVANCE

ПОКАЗАНИЯ: КУПЕРОЗ, РОЗАЦЕА

- СВЕТОВЫЕ ИЛИ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ +
REVI SILK 2 МЛ
В ОДНУ ПРОЦЕДУРУ
НА КУРС ОТ 3-х ПРОЦЕДУР С ИНТЕРВАЛОМ 3-4 НЕДЕЛИ (ПО
ПОКАЗАНИЯМ)

- В РАЗНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ВВЕДЕНИЕМ REVI SILK НЕ МЕНЕЕ 2 НЕДЕЛЬ



Световые или
лазерные
технологии

REVI STRONG

Лицо без фильтров

Концентрация ГК: 1.5 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.03 %
Техника введения: бугорковая
(внутридермально, субдермально),
линейная с использованием канюли
Рекомендуемая игла: 33G/4мм
Канюля: 22G
Объем: 1 и 2 мл



Показания:

- Изменения 3-4 й степени по шкале Мерц, III-IV типа по Глогау
- Коррекция возрастных изменений (мелкие морщины, потеря тургора и эластичности кожи)
- Гиперпигментация
- Постакне (рубцы, застойные пятна)
- Розацеа (папуло-пустулезный подтип в стадии ремиссии)
- Синдром фанетопически жирной кожи
- Расширенные поры
- Подготовка к другим инъекционным и аппаратным методикам и реабилитация после них



ПРОТОКОЛ AGE CONTROL



● REVI STRONG 2 МЛ

3 ПРОЦЕДУРЫ РАЗ В МЕСЯЦ

Эффекты:

- Глубокое увлажнение и восстановление кожи
- Повышение плотности и упругости кожи
- Разглаживание микрорельефа кожи
- Уменьшение морщин
- Осветление и сокращение пигментации
- Здоровая , сияющая кожа



ПРОТОКОЛ FACE APP

ПОКАЗАНИЯ:
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

● REVI STRONG 2 МЛ

4 ПРОЦЕДУРЫ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

Эффекты:

- Противовоспалительное действие
- Уменьшение проявлений

пигментных пятен

- Выравнивание и улучшение

цветности кожи



*внутридермально +
микропапульно по пигменту*

ПРОТОКОЛ FACE APP ADVANCE

ПОКАЗАНИЯ: ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

● СВЕТОВЫЕ, ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ +
REVI STRONG 2 мл (внутридермально+поверхностно)
В ОДНУ ПРОЦЕДУРУ
НА КУРС ОТ 4-х ПРОЦЕДУР С ИНТЕРВАЛОМ 3-4 НЕДЕЛИ

● В РАЗНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ВВЕДЕНИЕМ REVI STRONG НЕ МЕНЕЕ 2 НЕДЕЛЬ



Световые, лазерные
технологии

ПРОТОКОЛ FACE APP

ПОКАЗАНИЯ: ПОСТАКНЕ

● REVI STRONG 2 МЛ

3 ПРОЦЕДУРЫ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

Техника введения:

необходимо провести субцизию рубца с введением препарата под рубец, остаток препарата вводится бугорковой техникой по всему лицу



ПРОТОКОЛ FACE APP ADVANCE

ПОКАЗАНИЯ: ПОСТАКНЕ

● REVI STRONG 2 МЛ

Техника введения:
необходимо провести субцизию рубца с введением
препарата под рубец, остаток препарата вводится
бугорковой техникой по всему лицу.



REVI STRONG

REVI STRONG

CO2

REVI STRONG

3-4 недели

3-4 недели

3-4 недели

A photograph of four women of diverse ethnicities smiling and embracing each other. The woman on the far left has blonde hair and is wearing a light beige top. The woman next to her has dark hair and is wearing a white top. The woman next to her has dark hair and is wearing a brown top. The woman on the far right has dark hair and is wearing a pink top. They are all smiling warmly at the camera. A dark brown rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the text 'ПРОТОКОЛЫ REVI MIX' in gold capital letters.

ПРОТОКОЛЫ
REVI MIX

ПРОТОКОЛ REVI FRESH

REVI EYE 1 МЛ +
REVI SILK 2 МЛ/REVI STRONG 2 МЛ
3 ПРОЦЕДУРЫ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

Препарат выбора:
REVI SILK – изменения 2-3й степени
по шкале Мерц, II-III типа по Глогау
REVI STRONG – изменения 3-4 й степени
по шкале Мерц, III-IV типа по Глогау

Базовый протокол работы с возрастными изменениями.
Основной этап для подготовки к дальнейшим процедурам
и реабилитации



Эффекты:

- Восстановление микроциркуляции и лимфодренажных свойств кожи
- Профилактика и уменьшение признаков фото- и хроностарения
- Восполнение гидрорезерва кожи
- Нормализация меланогенеза
- Осветление «темных кругов» в области глаз
- Увеличение тонуса и тургора кожи
- Разглаживание мелких морщин
- Свежий, отдохнувший вид

ПРОТОКОЛ LONG — TIME

*Двойной эффект: сияние
и увлажнение на длительное время*

REVI STRONG 2 МЛ + REVI STYLE 1 МЛ
2 ПРОЦЕДУРЫ 1 РАЗ В МЕСЯЦ



Техника введения:
REVI STRONG – бугорковая
REVI STYLE – поверхностно

Эффекты:

- Улучшение микроциркуляции и лимфодренажных свойств кожи
- Выраженная и длительная гидратация кожи
- Защита от негативного воздействия УФ
- Разглаживание мелких морщин
- Сужение расширенных пор
- Нормализация меланогенеза
- Улучшение тургора и эластичности кожи
- Нормализация выработки кожного сала



ПРОТОКОЛ SILK HANDS

● REVI SILK 1 МЛ + REVI STRONG 2 МЛ
1 ПРОЦЕДУРА РАЗ В 3 МЕСЯЦА

Техника введения:
REVI STRONG канюлей, линейно-ретроградная
REVI SILK поверхностно

Эффекты:

- Увлажненная кожа рук
- Устранение ксероза, пигментации
- Кожа подготовлена к другим инъекционным или аппаратным методикам
- Устранение мелких морщин
- Восстановление после воздействия внешних факторов (зимний период, активная инсоляция и тд)



ПРОТОКОЛ FACE APP

ПОКАЗАНИЯ: СЕБОРЕЯ

REVI STRONG (по себорейным зонам) 1 МЛ
REVI STYLE или REVI SILK (по коже лица)
3-4 ПРОЦЕДУРЫ С ИНТЕРВАЛОМ 3-4 НЕДЕЛИ, ДАЛЕЕ ПО
ПОКАЗАНИЯМ



или



Эффекты:

- Противовоспалительное действие
- Стимуляция местного иммунитета
- Нормализация выделения себума
- Сужение пор

