



FAVORI

BY PERFOTESORO

ПРОТОКОЛЫ

FAVORI PROZINC

– жидкие нити –



FAVORI

Prozinc - уникальная новинка от Favori!

Новейшее поколение Жидких нитей с экзосинтесомами!

Препарат обеспечивает создание коллагенового каркаса для долгосрочного лифтинг-эффекта и биостимуляции на клеточном уровне.

Восстанавливает тургор, эластичность и молодости кожи.

Стимулирует неоколлагенез и долгосрочное формирование коллагеновых волокон, оказывает антигликационный эффект и антиоксидантную защиту.



ЖИДКИЕ НИТИ

Векторный лифтинг

Техника постановки:

линейно-ретроградно

Глубина: 4-6мм

Инструмент: канюля 25-22G x 70мм


Расход: лицо 5-10 мл

Интервал между процедурами:

14-21 день

Курс: рекомендовано 2-3 процедуры

(в зависимости от проблемы)

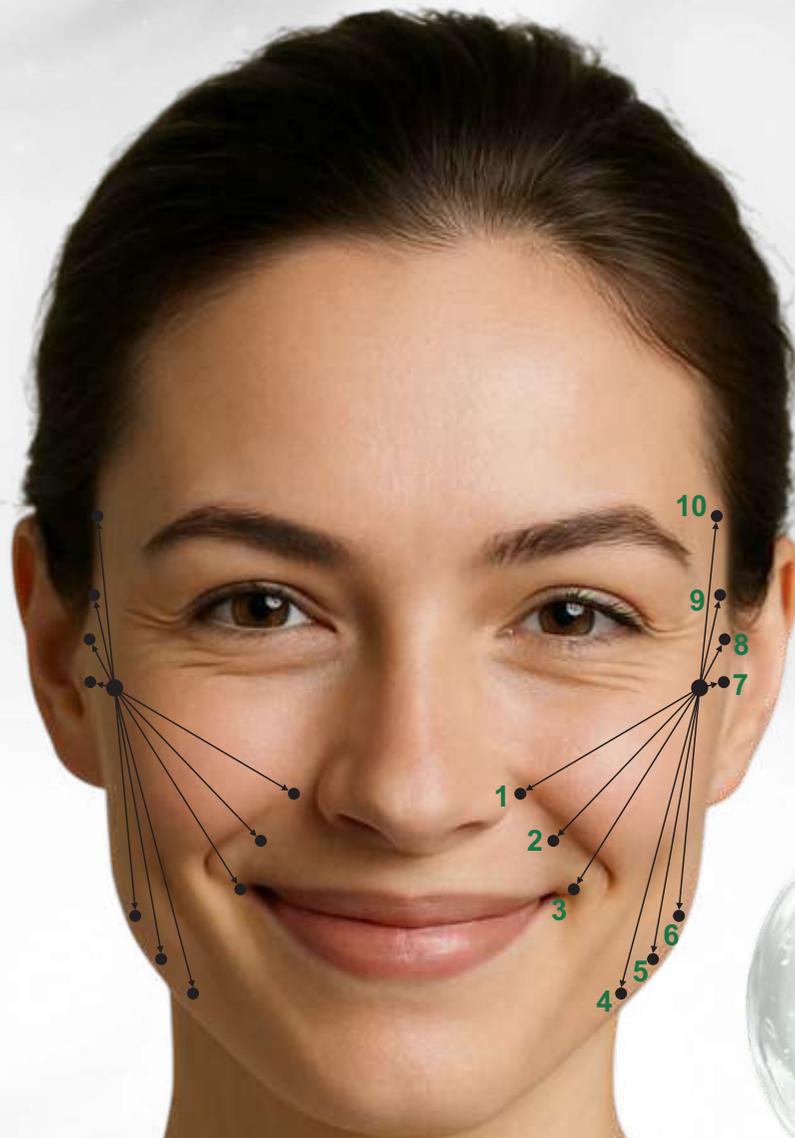

ЖИДКИЕ НИТИ

Армирование субментальной зоны

Техника постановки:

линейно-ретроградно, веерно

Глубина: 6мм

Инструмент:


- игла 30G / 12-13мм

- канюля 25-22G x 50-70 мм

Расход: 2,5-5 мл

Интервал между процедурами: 14-21 день

Курс: 2-3 процедуры (в зависимости от проблемы)

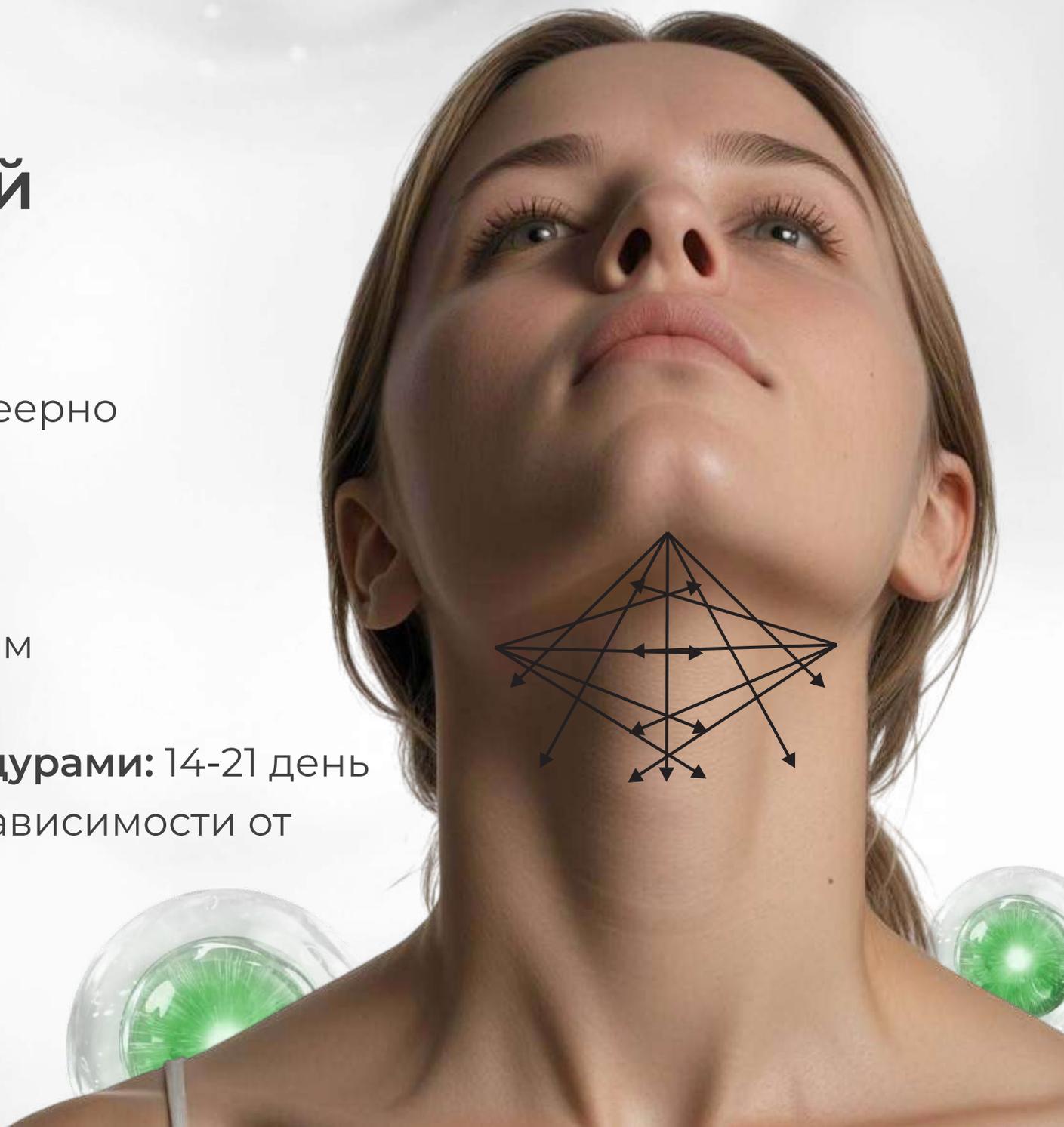

ЖИДКИЕ НИТИ

Выравнивание рельефа

Техника постановки:

бугорковая/болюсная

Глубина: 4-6мм

Угол введения: 45-60°

Инструмент: игла 30G x 4мм

Расход:


- на вкол 0,02-0,05мл бугорковая,

- до 0,1мл болюсная

Интервал между процедурами:

1р / 14-21 день

Курс: 3-4 процедуры

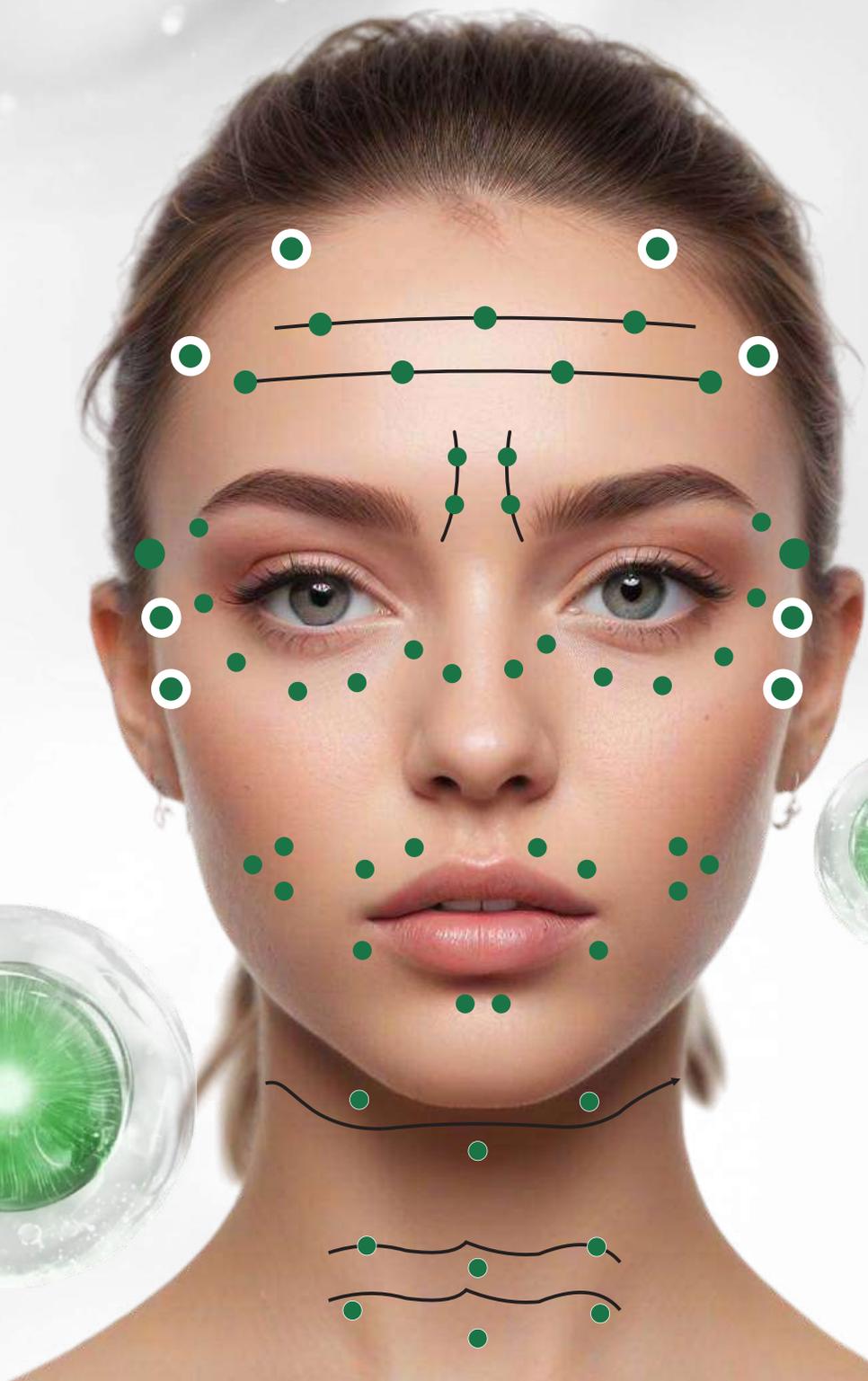

ЖИДКИЕ НИТИ

Лифтинг контура

Техника постановки: болюсная

Глубина: 4-6мм

Угол введения: 60°

Инструмент: игла 30G x 4мм

Расход:


- 0,1-0,2мл болюс

- 2,5мл лицо

Интервал между процедурами:

1р / 14-21 день

Курс: 3-4 процедуры

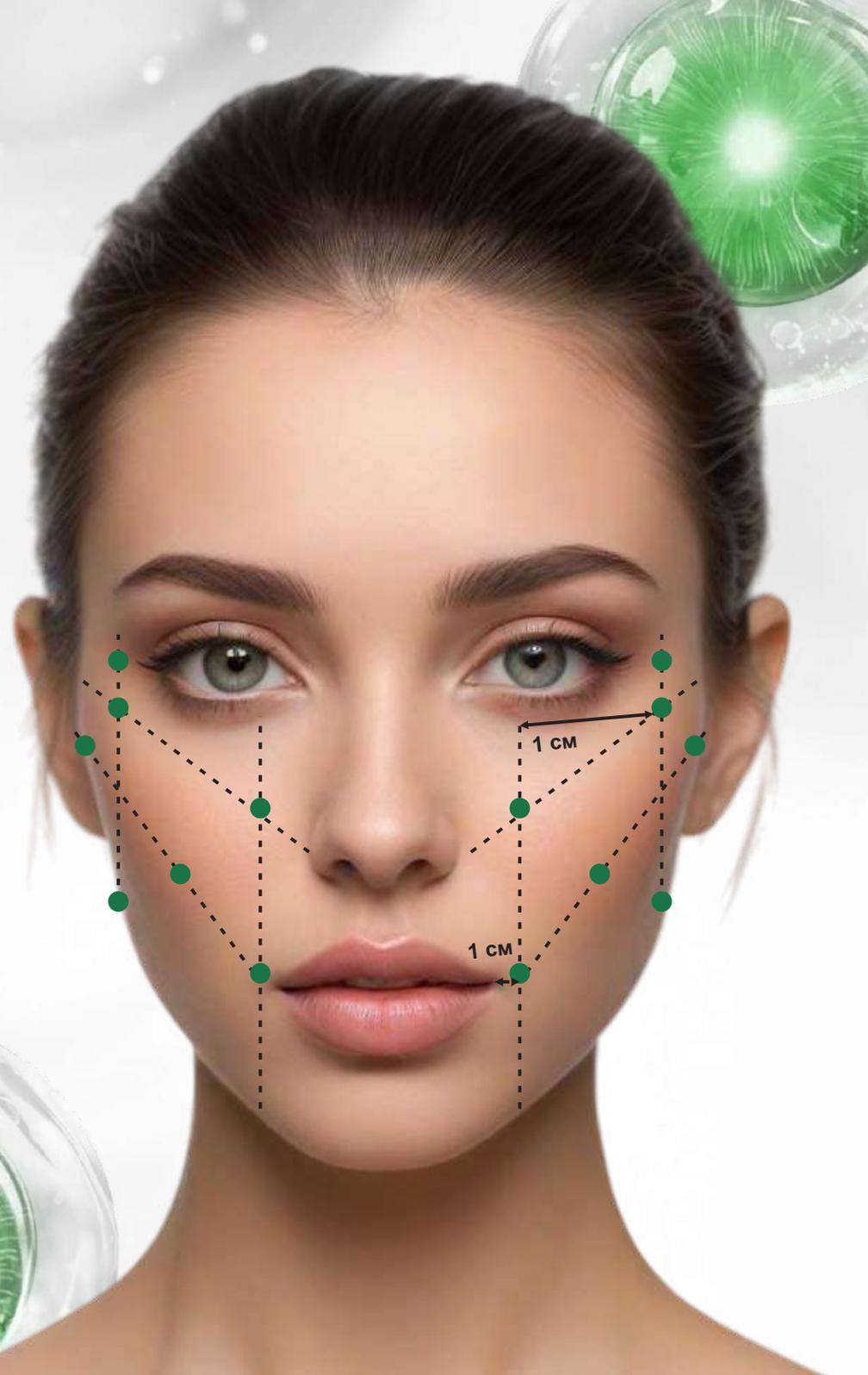

ЖИДКИЕ НИТИ

Коррекция постуральных заломов

Техника постановки:

линейно-ретроградно, веерно

Глубина: 4-6мм

Инструмент:

- игла 30G / 12-13мм

- канюля 25-22G x 50мм

Расход: до 1,5мл

Интервал между процедурами:

1р / 14-21 день

Курс: 3-4 процедуры



ЖИДКИЕ НИТИ

Лифтинг шеи по якорным точкам

Техника постановки:

бугорковая, болюсная

Глубина: 3-4 мм


Инструмент: игла 30G / 4мм

Расход: 2,5 мл (на вкол до 0,1мл)

Интервал между процедурами:

1р / 14-21 день

Курс: 3-4 процедуры

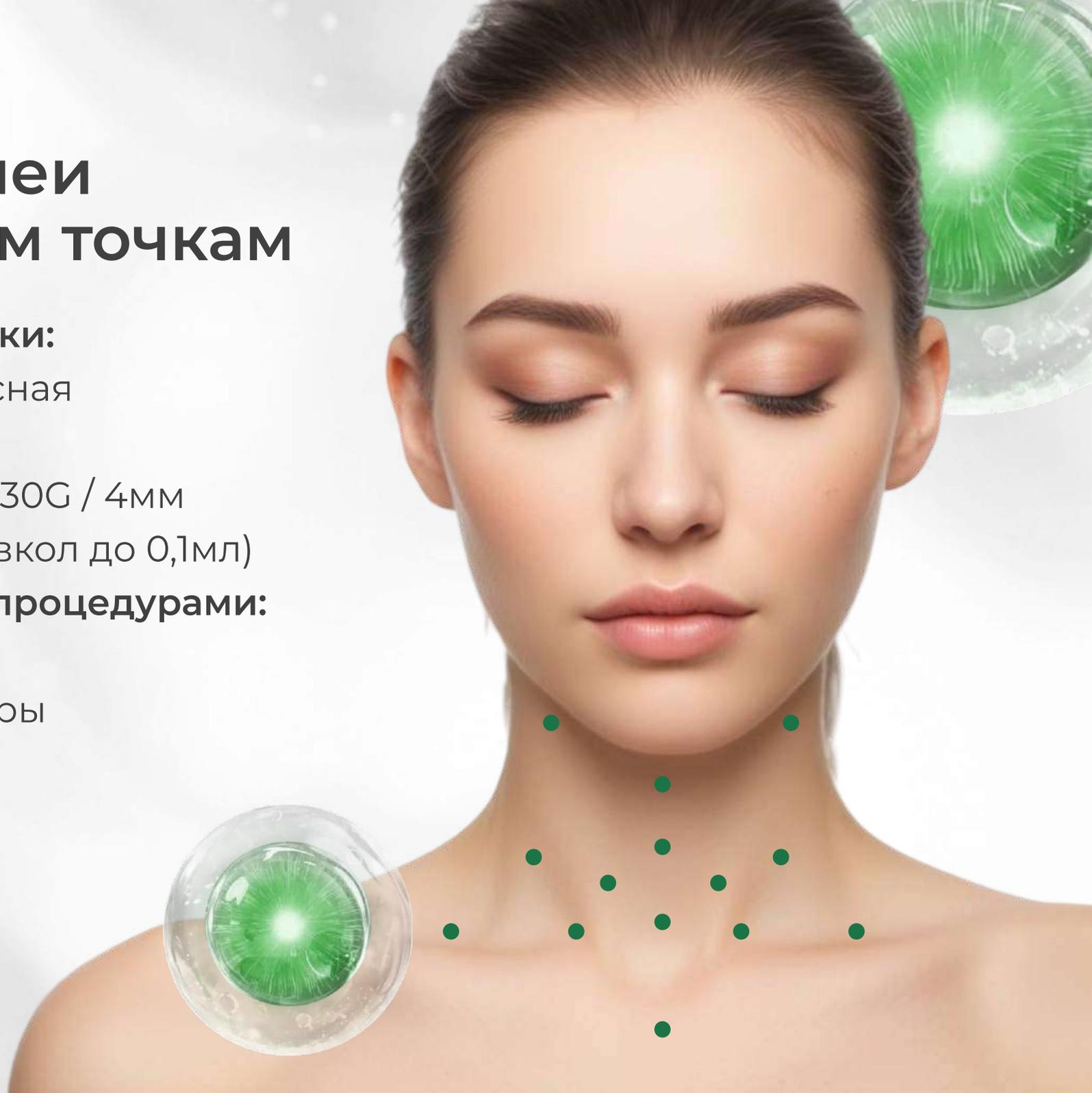

ЖИДКИЕ НИТИ

Уплотнение кожи кистей рук

Техника постановки:

векторная

Глубина: 3-4мм

Инструмент:

канюля 25-22G/ 50-70мм

Расход: 2,5мл на кисть

Интервал между процедурами:

14-21 день

Курс: 2-3 процедуры



ЖИДКИЕ НИТИ

Армирование провисаний кожи

Техника постановки:

линейно-ретроградно, веерно,
армирующая сетка

Глубина: 6мм


Инструмент: - игла 30G/12-13мм
- канюля 25-22G x 50-70мм

Расход: 5-15 мл

Интервал между процедурами:

14-21 день

Курс: 2-3 процедуры (в
зависимости от проблемы)

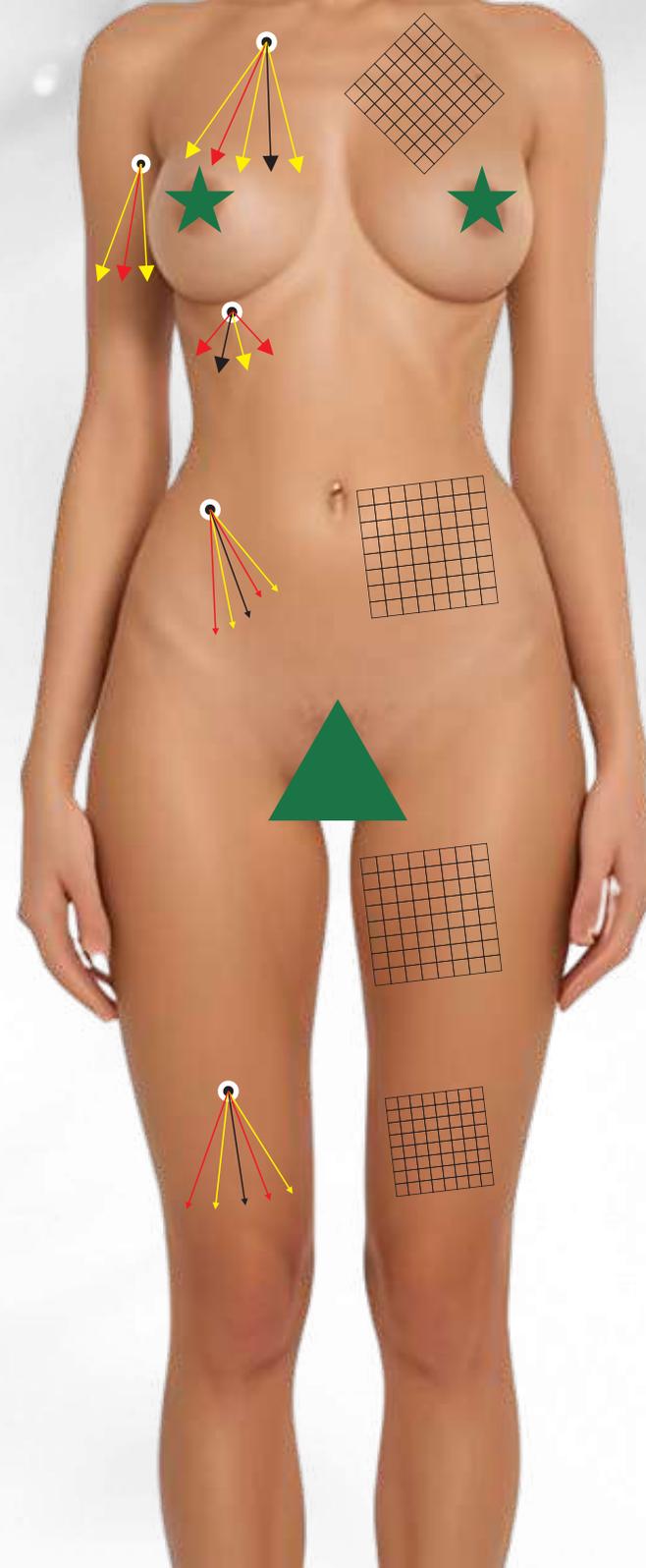

ЖИДКИЕ НИТИ

Диффузное уплотнение дермы

Техника постановки:

микробугорковая

Глубина: - 2-3мм зоны с тонкой кожей

- 4-5мм зоны с плотной кожей

Угол введения: 45°


Инструмент: игла 30G x 4мм

Расход: лицо – 5мл, шея – 5мл

Интервал между процедурами:

1р / 14 дн

Курс: 3-4 процедур (в зависимости
проблемы)

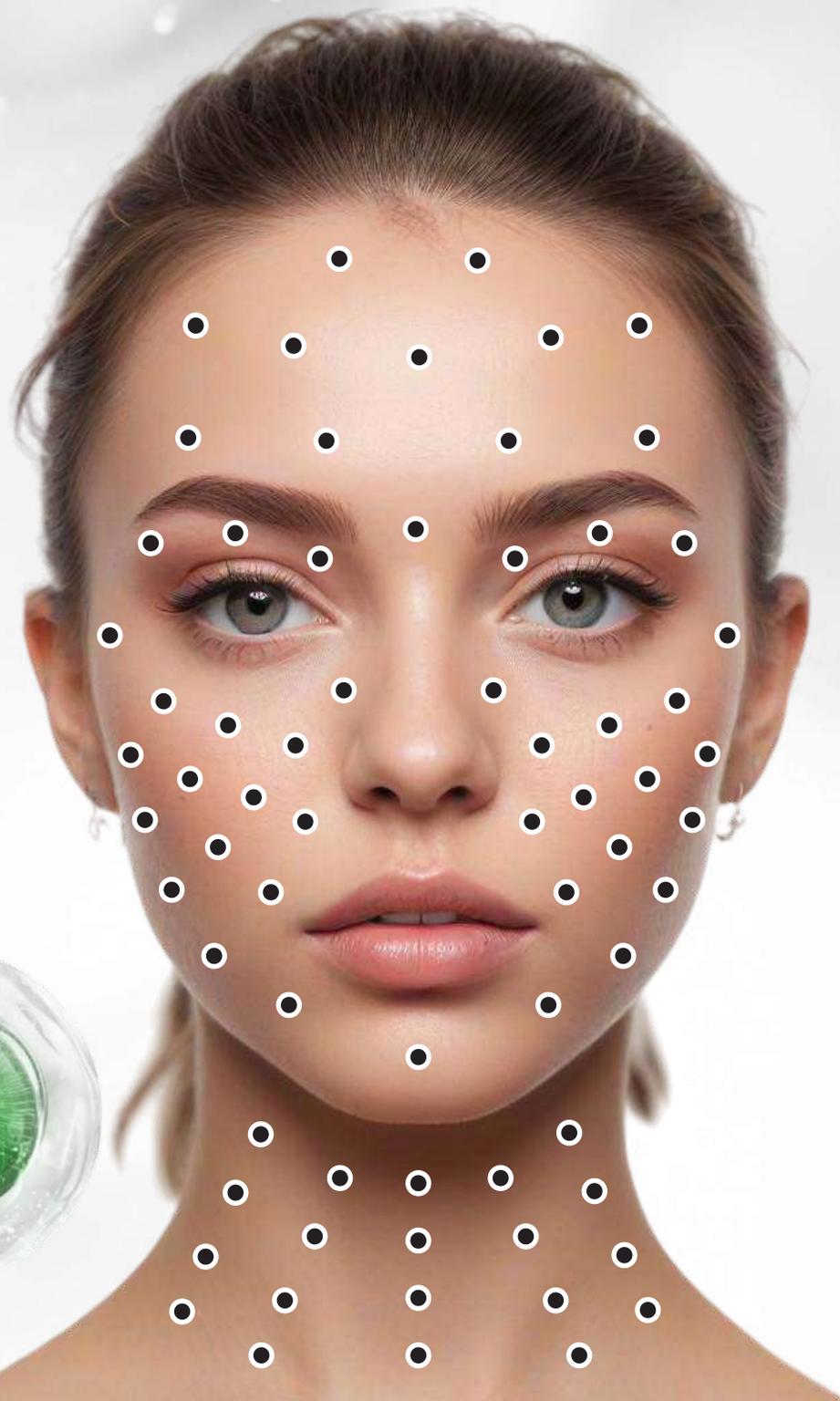

FAVORI

BY PERFOTESORO

