

EsteFILL[®]

HYALURONIC ACID SODIUM SALT

Уникальные филлеры нового
поколения с ламеллярной
структурой Российского
производства!

EsteFILL

HYALURONIC ACID SODIUM SALT

Уникальные филлеры нового поколения с ламеллярной структурой Российского производства!

- Филлеры «EsteFILL» являются безопасными вязкими растворами натриевой соли ГК. Они максимально приближены по физико-химическим свойствам к структуре дермы и рассасываются в течение от 5 до 12 месяцев.
- Они отличаются друг от друга вязкостью и ретикуляцией.
- Возможность выбора более вязкого или менее вязкого препарата позволяет решать косметологические проблемы на разных уровнях и различными техниками в комплексном омоложении.
- Gel-to-fluid-ratio* – создает естественный эластичный слой, соотношение стабилизированной ГК 90% к 10% нативной ГК.

*Возможность выдерживать динамические нагрузки гравитацию и мимику после введения препарата.





EsteFILL Revital


- Препарат «EsteFILL Revital» имеет высокую молекулярную фракцию гиалуроновой кислоты с доказанной эффективной концентрацией 15 мг/мл и массу более 3 млн. ДА.
- Присутствие в препарате уникальной буферной системы PBS, способствует поддержанию слабощелочного pH среды 7,2 в месте введения и окружающих областях, гарантирует отсутствие раздражающего действия при введении.
- Биоревитализант «EsteFILL Revital» имеет разную молекулярную массу ГК в соотношении:
 - низкомолекулярная ГК 30%
 - высокомолекулярная ГК 70%

EsteFILL Revital

- «EsteFILL Revital» имеющий концентрацию 15 мг/мл и частично модифицированную нативную ГК, которая увеличивает время её пребывания в тканях при одновременном улучшении способности нейтрализовать свободные радикалы.



Концентрация

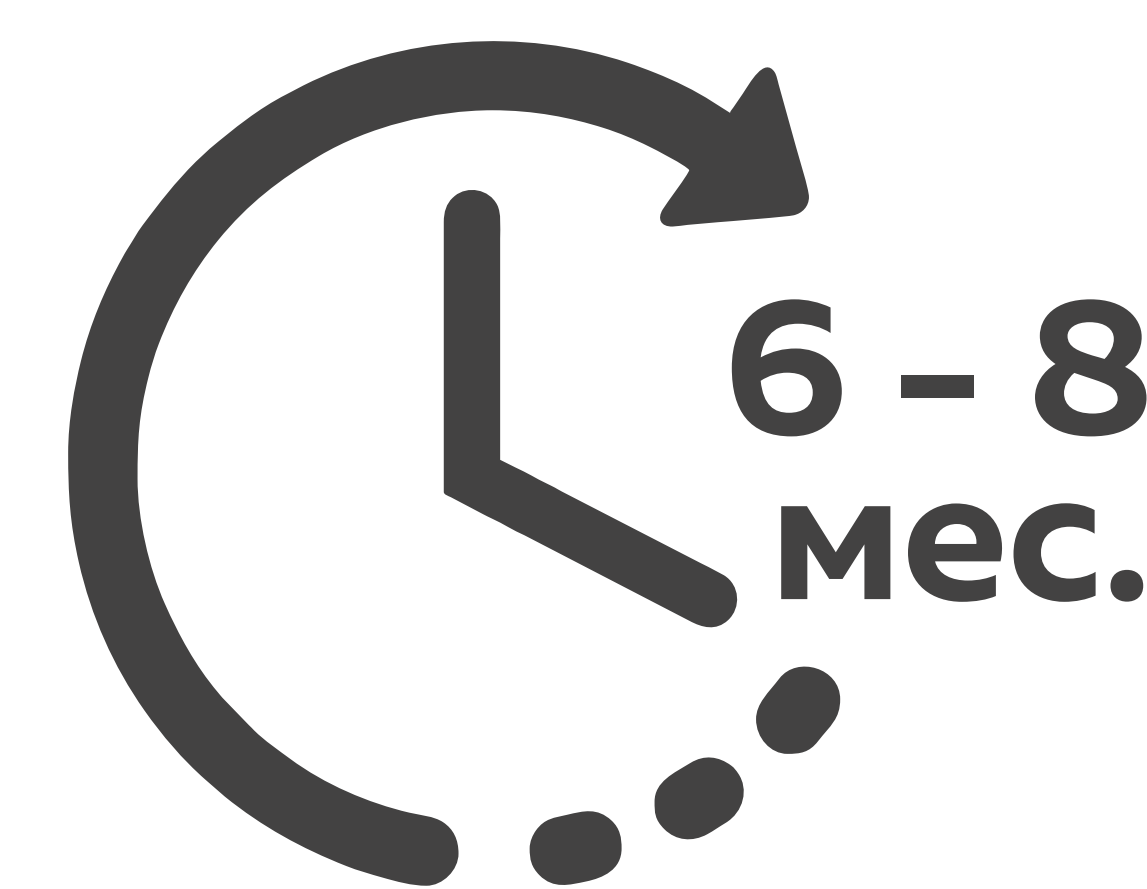


Продолжительность действия курса



Объем препарата



<0,5 ЕЭ/мг
Эндотоксины

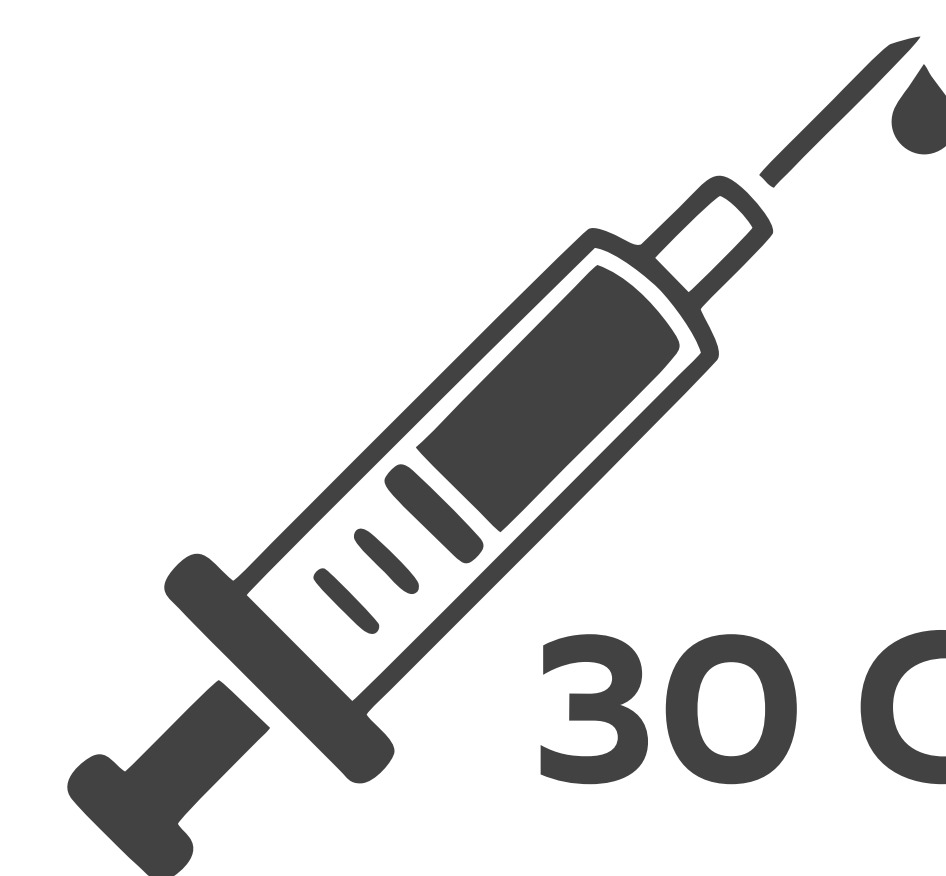

Рекомендуемая игла

Остаток
сшивающего агента
BDDE
<0,0002%



Показания:


- от сухости и выраженной дегидратации кожи, фото- и хроностарения кожи лица и тела (морщины, птоз и/или снижение тонуса и тургора, уменьшение эластичности кожи, иные признаки возрастных изменений);
- для подготовки к инъекционной пластике и аппаратным процедурам (фотоомоложению, лазерной терапии, радиоволновому и ультразвуковому лифтингу), химическим пилингам;
- для реабилитации после пилингов, подготовки к загару, восстановлению после фотоповреждения.

EsteFILL Soft

- «EsteFILL Soft» имеющий концентрацию 18 мг/мл, применяется на участках тканей с существенным деформационным напряжением, для коррекции поверхностных дефектов, в том числе мимического происхождения.



Концентрация

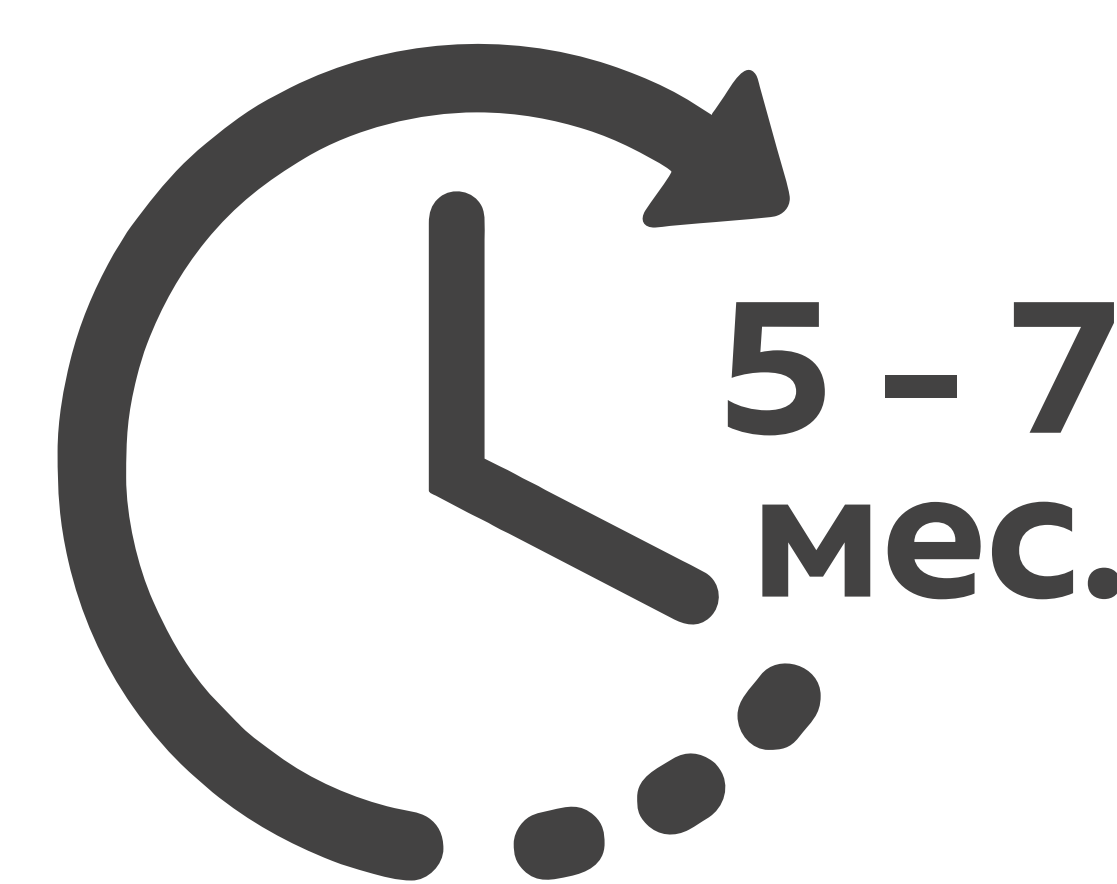


Продолжительность действия



Объем препарата



Эндотоксины

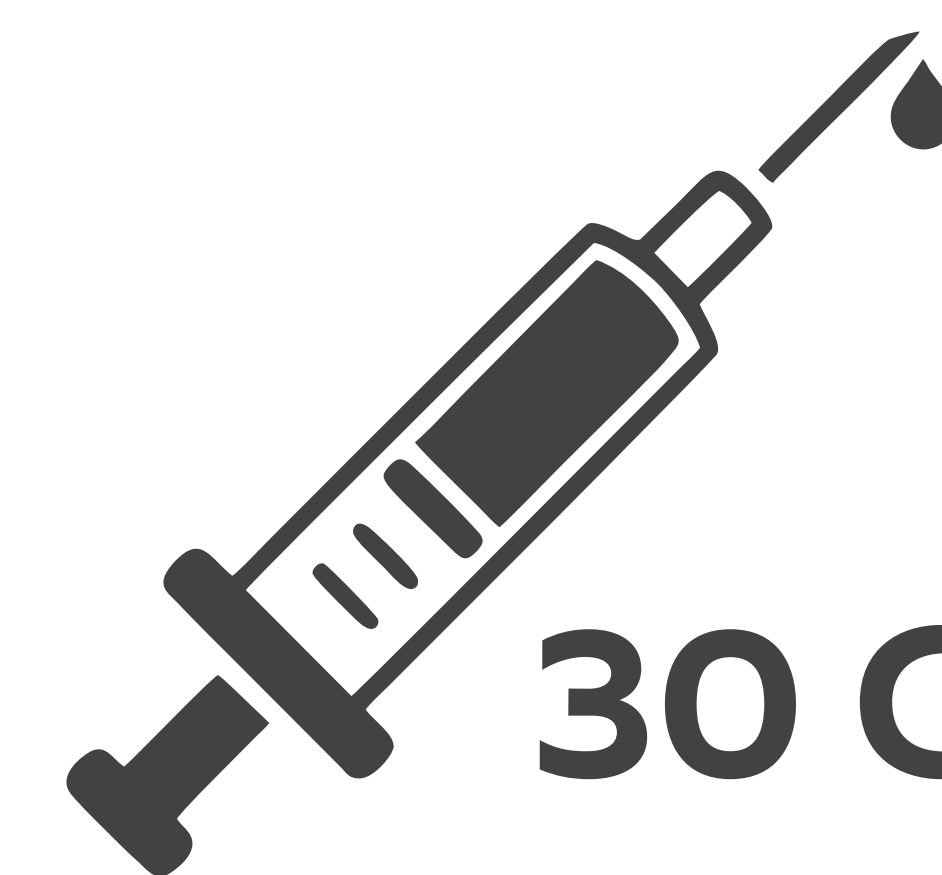

Рекомендуемая игла

Остаток
сшивающего агента
BDDE
<0,0002%




Показания:


- для коррекции тонких поверхностных морщин лба;
- для подкожной поверхностной коррекции зоны виска;
- для коррекции слезной борозды;
- для коррекции контура губ;
- для ликвидации тонких горизонтальных морщин шеи;
- для армировании кожи лица, шеи, декольте и любых других участков тела.

EsteFILL Medium


- «EsteFILL Medium» имеющий концентрацию 23 мг/мл, подходит для процедур, когда нужно добиться увеличения объёма тканей и длительного поддержания эффекта в условиях постоянной динамической нагрузки, используются для замены гидродинамического объема внеклеточного матрикса.

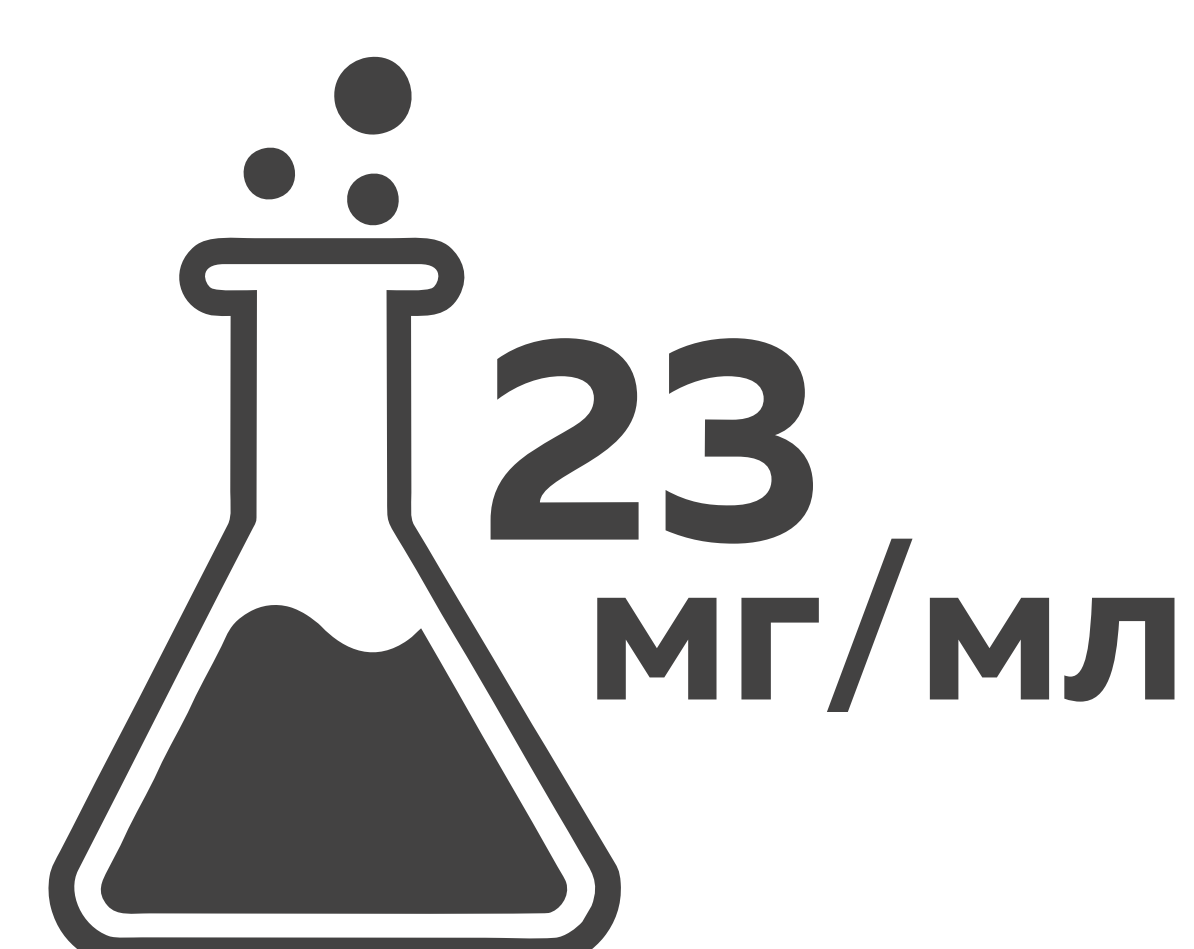


Концентрация

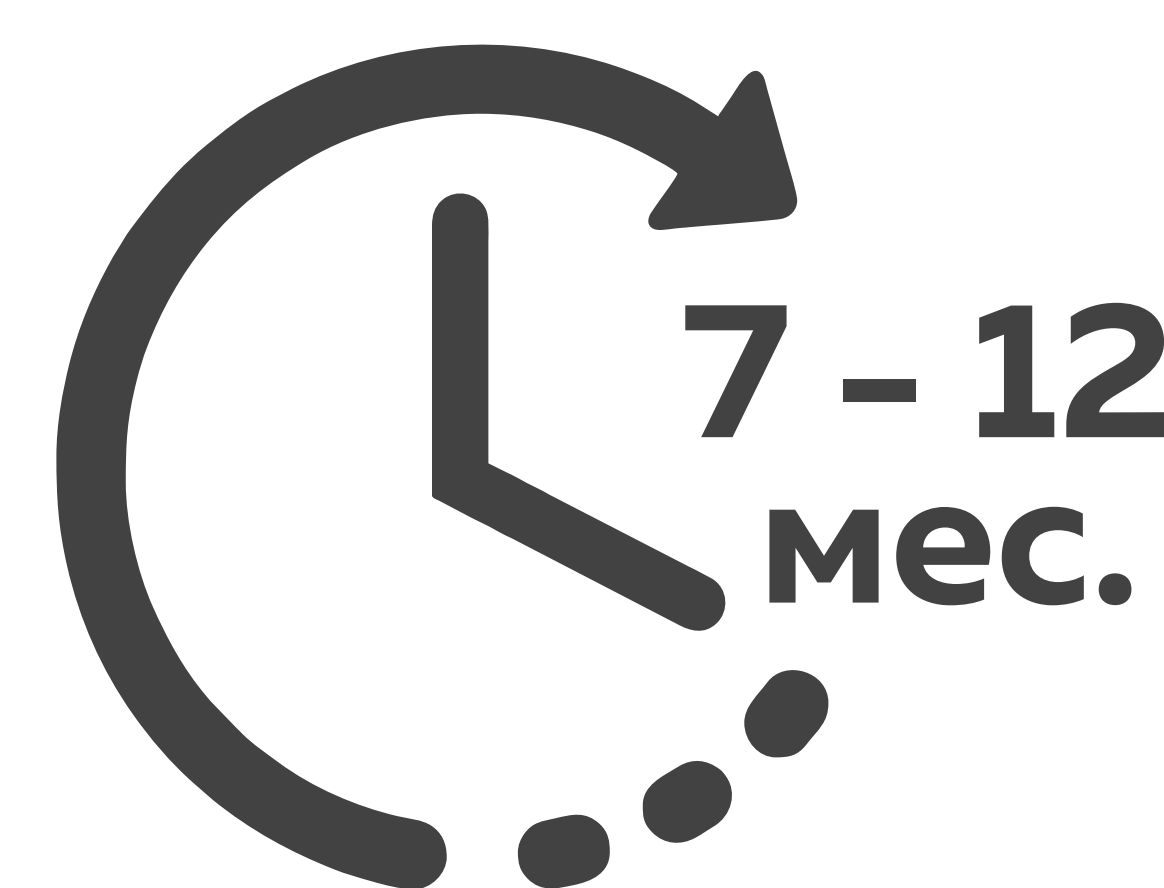

Продолжительность действия

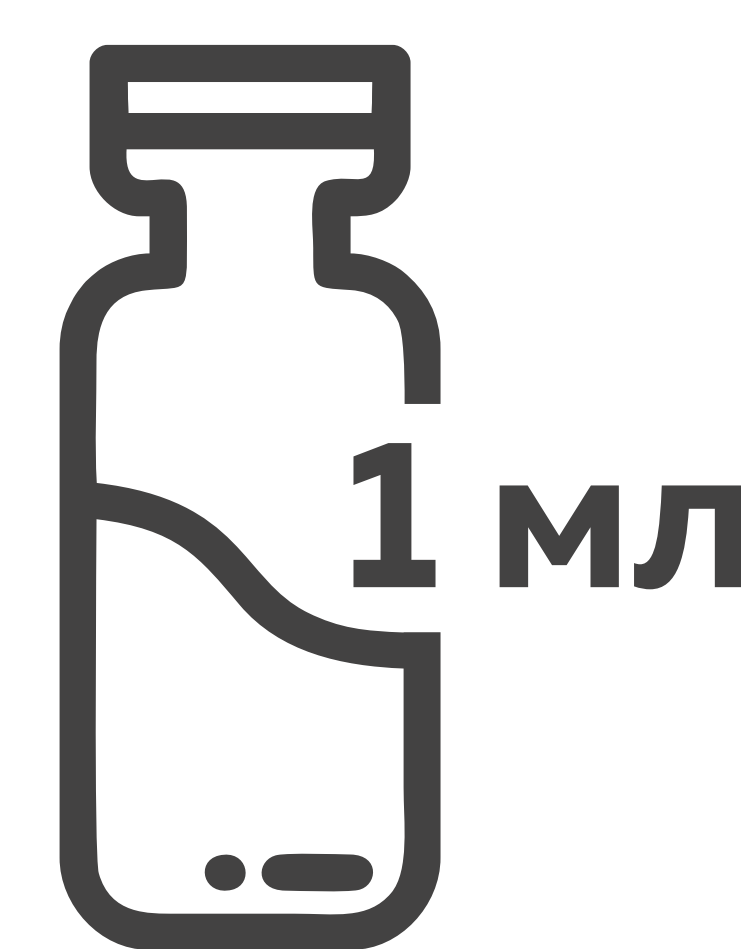

Объем препарата

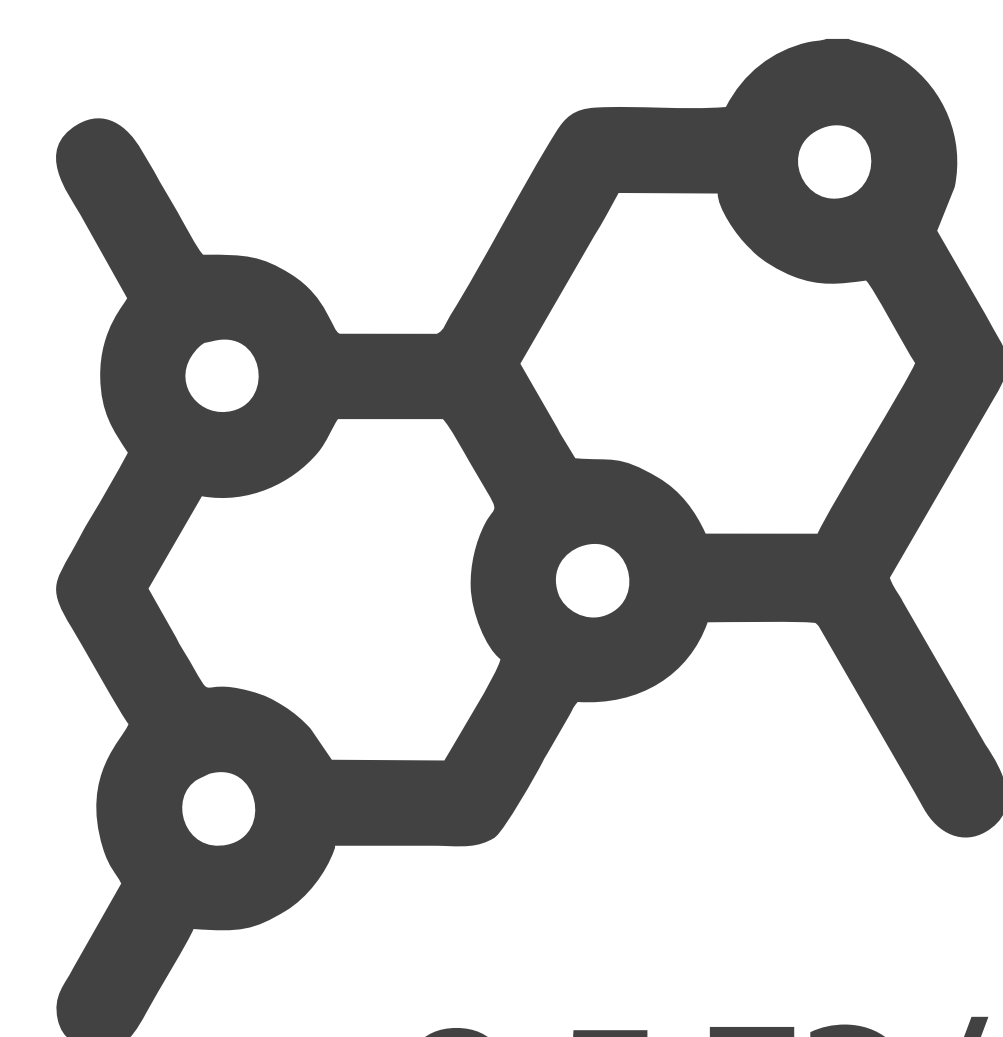

<0,5 ЕЭ/мг
Эндотоксины



Рекомендуемая игла

Остаток
сшивающего агента
BDDE
<0,002%



Показания:


- для коррекции глубоких горизонтальных морщин лба;
- для коррекции средней глубины морщин; и заломов носогубных складок; для коррекции губоподбородочных складок (морщин марионеток);
- для коррекции контура и объема губ;
- для создания деликатных объемов (лоб, нос, щеечно-скуловая и височная зона);
- для коррекции тыла кистей рук.

EsteFILL Ultra

- «EsteFILL Ultra» имеющий концентрацию 25 мг/мл, предназначен для имплантации в глубокую жировую клетчатку и для супрапериостального введения. Подходит для процедур выравнивания макрорельефа, контурного моделирования лица и объёмной коррекции.




Концентрация

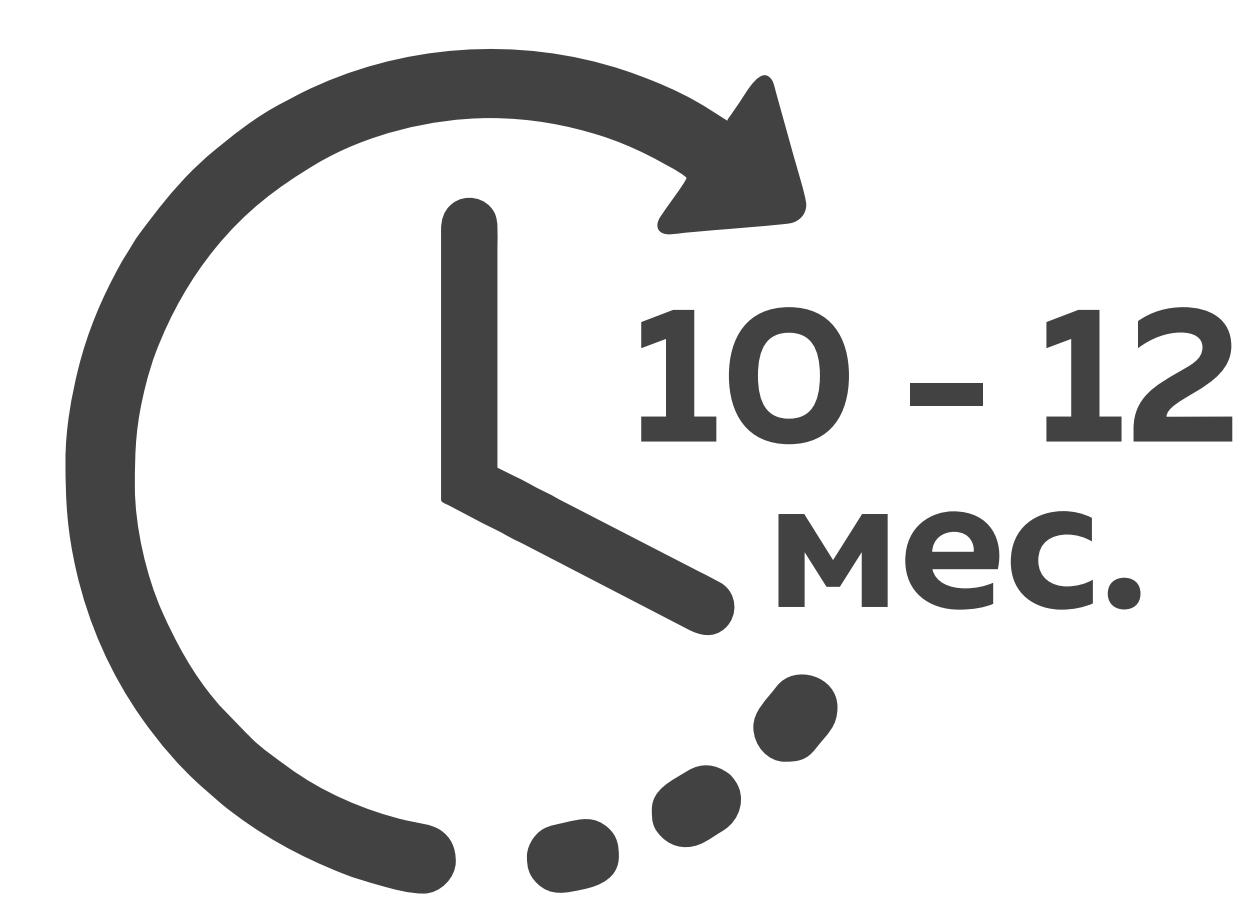


Продолжительность действия



Объем препарата

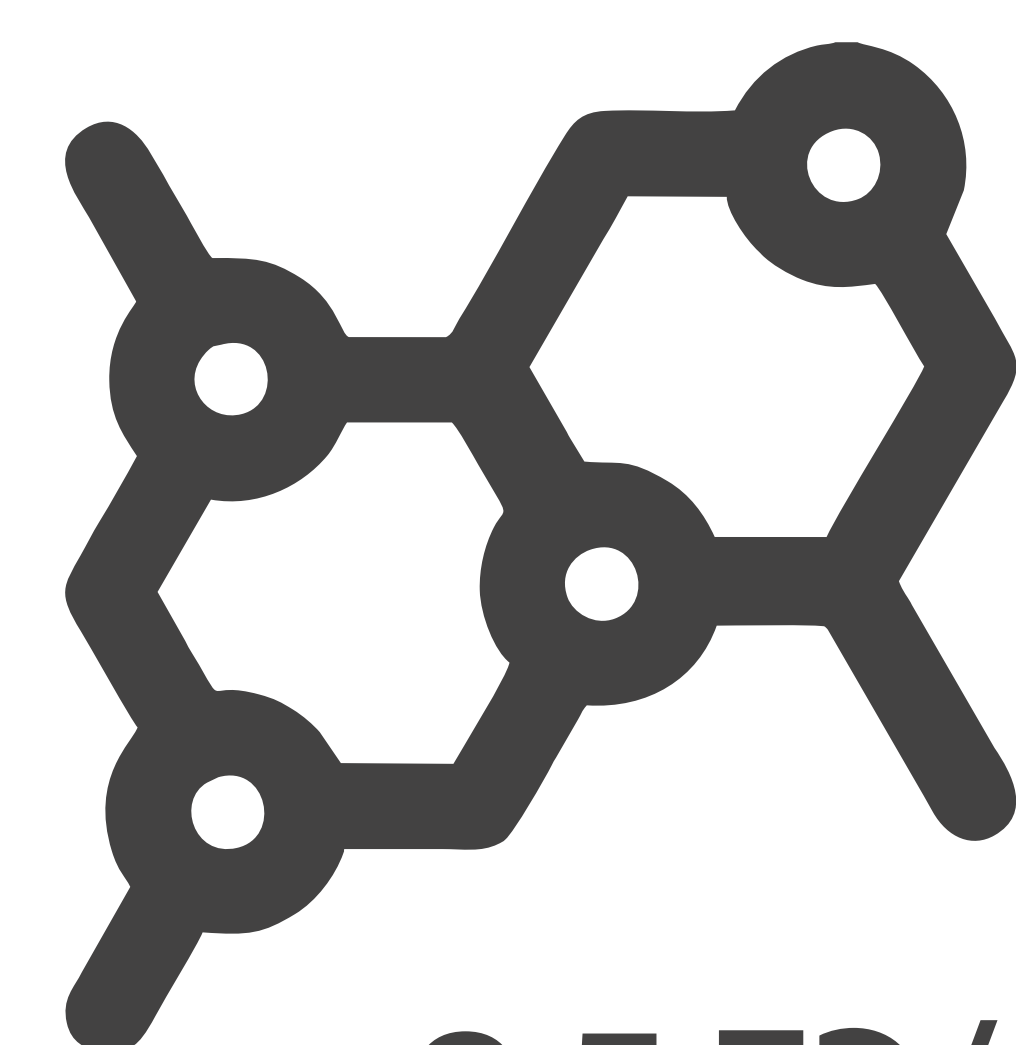

<0,5 ЕЭ/мг
Эндотоксины

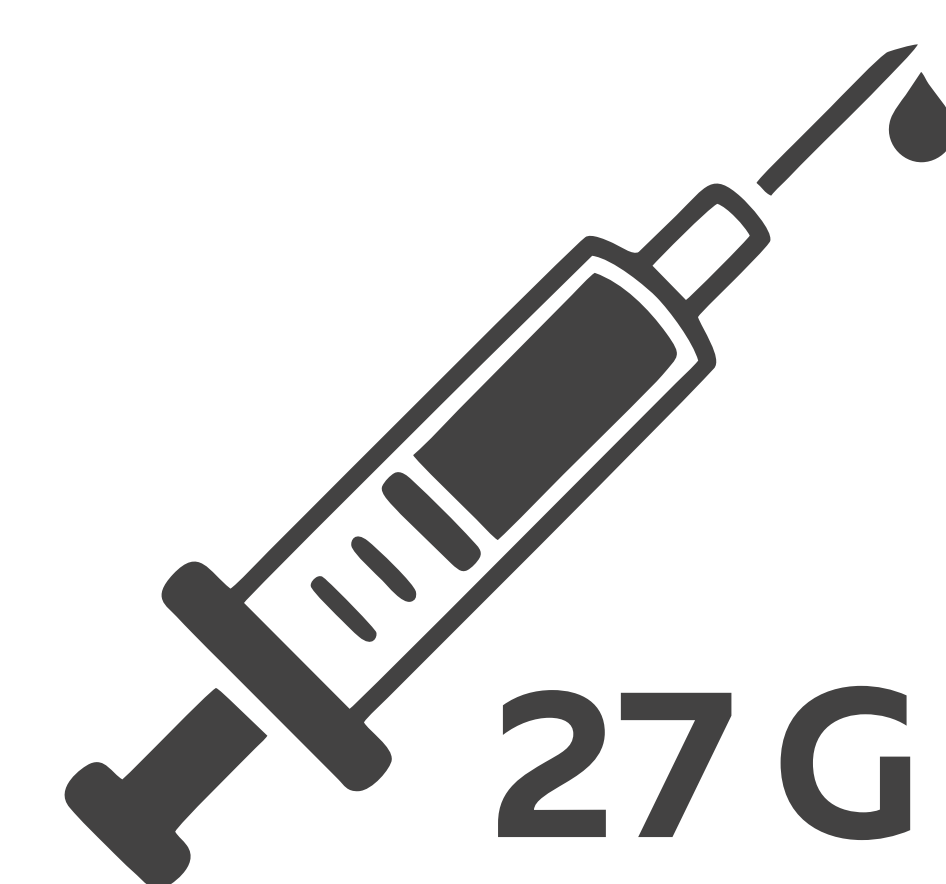

27 G 1/2
Рекомендуемая игла

Остаток
сшивающего агента
BDDE
<0,0002%



Показания:

- для создания объемов в различных зонах лица (скулы, углы нижней челюсти, подбородок, висок, мочки ушей);
- для лифтинговых целей (лифтинговое моделирование, моделирующий лифтинг, MODELING LIFTING, «темпоральный лифтинг»);
- для улучшения макрорельефа, исправления форм, пропорций и углов лица.



EsteFILL Intim

БЕЗБОЛЕЗНЕННО: абсолютно комфортный для пациента метод коррекции дефектов кожи и интимного омоложения.

БЕЗОПАСНО: используются только гипоаллергенные препараты, в основе которых гиалуроновая кислота – естественный компонент кожи.

ИНДИВИДУАЛЬНО: в любой момент можно провести коррекцию или повторную процедуру, так как гиалуроновая кислота постепенно полностью выводится из организма.

БЫСТРО: процедура занимает примерно час и проходит с применением аппликационной (поверхностной) анестезии, то есть не требует наркоза.


ЕСТЕСТВЕННО: помимо эстетического результата филлеры способствуют повышению увлажнения слизистой, также ускоряется обмен веществ в тканях и улучшается функция рецепторов, отвечающих за сексуальное возбуждение.

EsteFILL Intim

- «EsteFILL Intim» предназначен для временной коррекции дефектов кожи, анатомических дефектов и недостатка объема мягких тканей, контурной пластики и коррекции возрастных изменений по медицинским и эстетическим показаниям в уро – и аногенитальной области у мужчин и женщин.




Концентрация

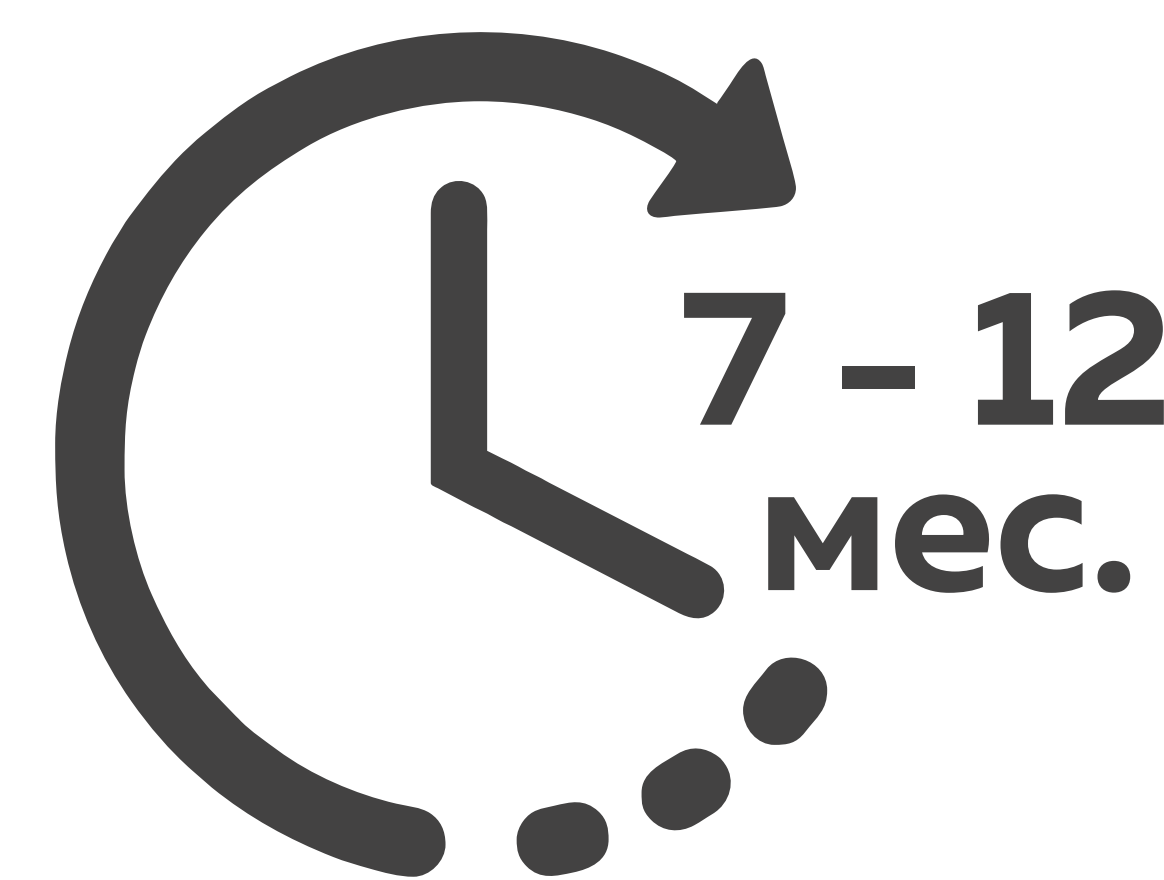

Продолжительность действия




Объем препарата

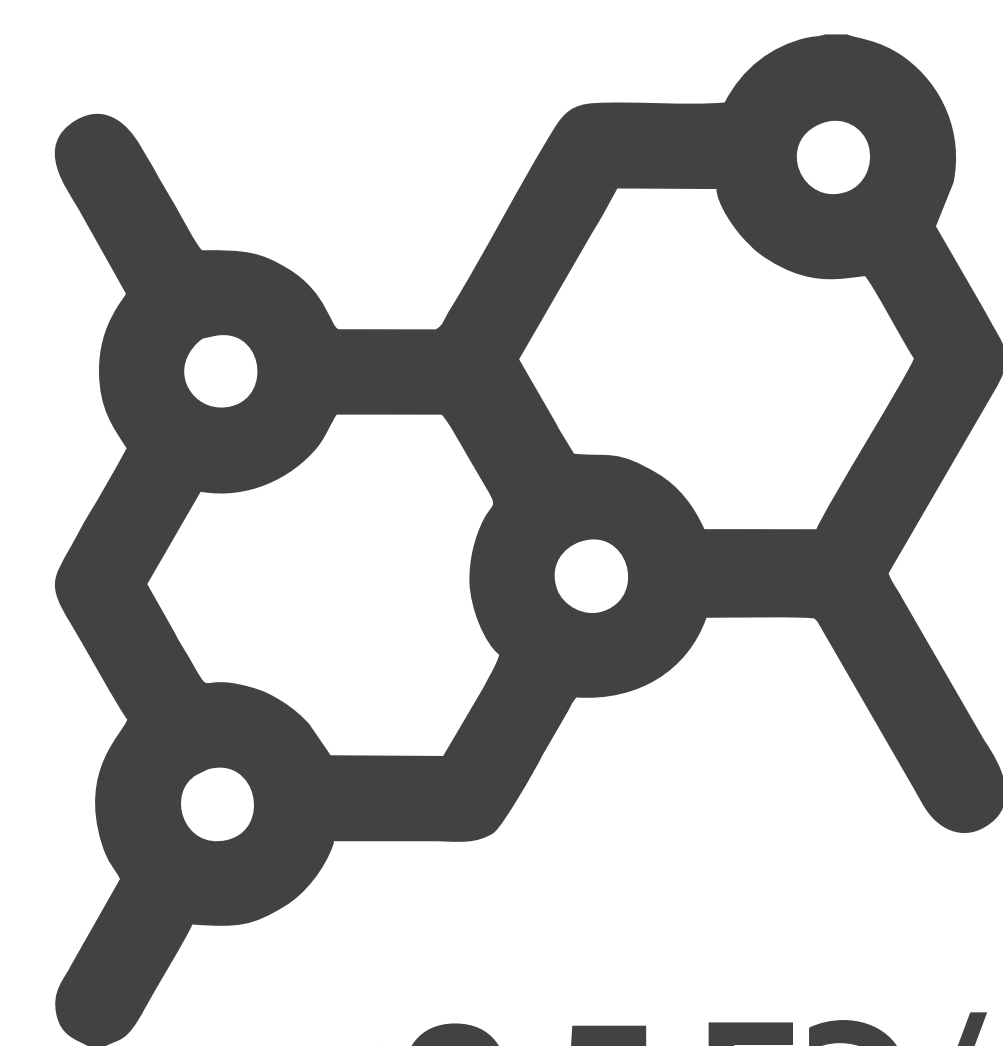

<0,5 ЕЭ/мг

Эндотоксины

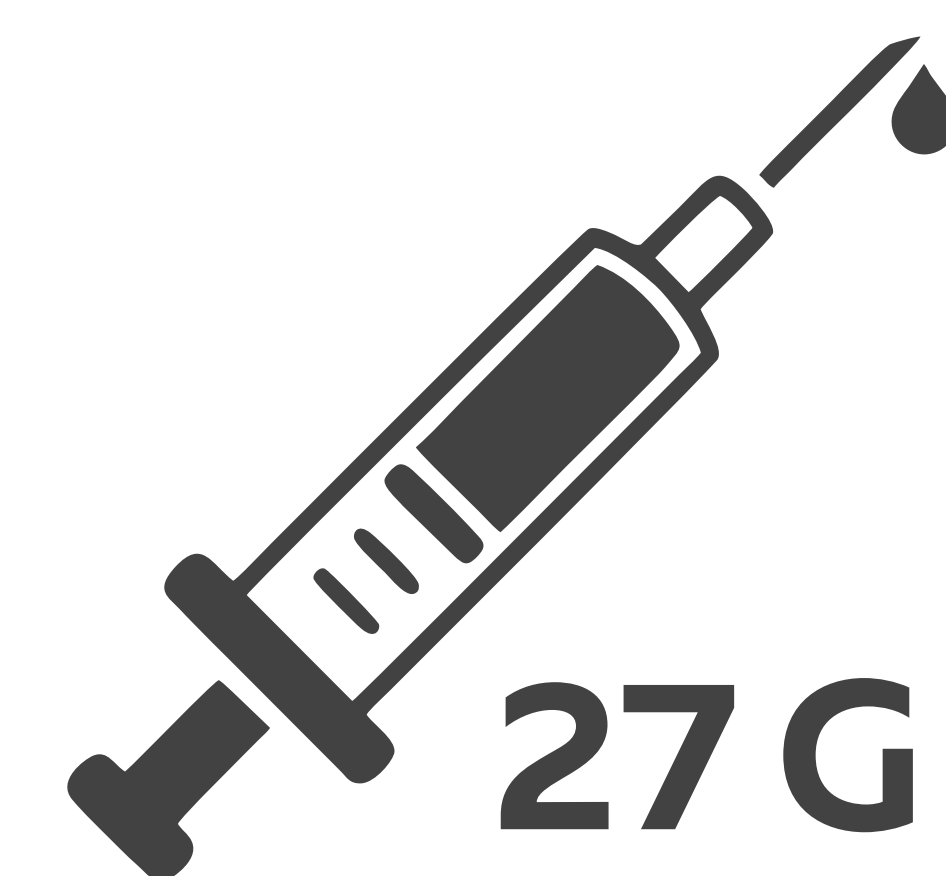

27 G 1/2

Рекомендуемая игла

Остаток
сшивающего агента
BDDE
<0,0002%



Показания:

- увеличение точки G
- рубцовая деформация промежности
- клиторопластика
- дистрофия, атрофия больших половых губ, сухость преддверия влагалища
- уменьшение входа во влагалище и внутренний диаметр влагалища
- решение урологических проблем

ован в РФ

350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 225/1

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Терлазулла"
(ООО "Терлазулла"), Россия,
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 225/1

Место производства медицинского изделия
ООО "АБДЕРА", Россия, 117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 1, 5, 11

Номер регистрационного досье № **РД-44035/61807 от 09.09.2021**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **3**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.22.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 08 ноября 2021 года № 10466
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

 **Д.Ю. Павлюков**

0051386

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2021 года № РЗН 2019/8924

Лист 1

На медицинское изделие

Имплантат гиалуроновый вязкоэластичный для инъекционной контурной пластики Эстефилл (EsteFILL) по ТУ 32.50.22.190-001-21791916-2016,

варианты исполнения:

I. Эстефилл ревитал (EsteFILL revital), в составе:

- шприц наполненный 2,0 мл - 1 шт.;
- игла инъекционная 30G1/2 - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- стикер-вкладыш с номером партии и сроком годности - 2 шт.

II. Эстефилл софт (EsteFILL soft), в составе:

- шприц наполненный 1,0 мл - 1 шт.;
- игла инъекционная 30G1/2 - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- стикер-вкладыш с номером партии и сроком годности - 2 шт.

III. Эстефилл медиум (EsteFILL medium), в составе:

1. - шприц наполненный 1,0 мл - 1 шт.;

- игла инъекционная 30G1/2 - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- стикер-вкладыш с номером партии и сроком годности - 2 шт.

2. - шприц наполненный 2,0 мл - 1 шт.;

- игла инъекционная 30G1/2 - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- стикер-вкладыш с номером партии и сроком годности - 2 шт.

IV. Эстефилл ультра (EsteFILL ultra), в составе:

1. - шприц наполненный 1,0 мл - 1 шт.;

- игла инъекционная 27G1/2 - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- стикер-вкладыш с номером партии и сроком годности - 2 шт.

2. - шприц наполненный 2,0 мл - 1 шт.;

- игла инъекционная 27G1/2 - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- стикер-вкладыш с номером партии и сроком годности - 2 шт.

V. Эстефилл интим (EsteFILL intim), в составе:

1. - шприц наполненный 1,0 мл - 1 шт.;

- игла инъекционная 27G1/2 - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

 **Д.Ю. Павлюков**

0088247

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2021 года № РЗН 2019/8924

Лист 2

- стикер-вкладыш с номером партии и сроком годности - 2 шт.
2. - шприц наполненный 2,0 мл - 1 шт.;
- игла инъекционная 27G1/2 - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- стикер-вкладыш с номером партии и сроком годности - 2 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

 Д.Ю. Павлюков

0088246

EsteFILL

HYALURONIC ACID SODIUM SALT

Уникальные филлеры нового поколения с ламеллярной структурой Российского производства!

Новая технология создания «EsteFILL» максимально приближенная к идеалу. Это позволяет использовать филлеры для решения широкого круга задач лифтингового моделирования, улучшения волюмической, динамической и контурной геометрии лица, моделирование ткани которые способны полностью обеспечить потребности косметолога и пациента.

«EsteFILL» – ФИЛЛЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА!

- Баланс упругости и пластичности!
- Беспрецедентно высокая молекулярная масса гиалуроновой кислоты!*
- Высокая стабильность и длительность эффекта!
- Идеальные формы! Быстрый результат!

*для филлеров на основе ГК.

Бойко Елена Владимировна
Сертифицированный врач-эксперт «EsteFILL»



EsteFILL[®]


HYALURONIC ACID SODIUM SALT

Уникальные филлеры нового поколения с ламеллярной структурой Российского производства!

+7(495)125-12-15

www.bepharm.ru

info@bepharm.ru

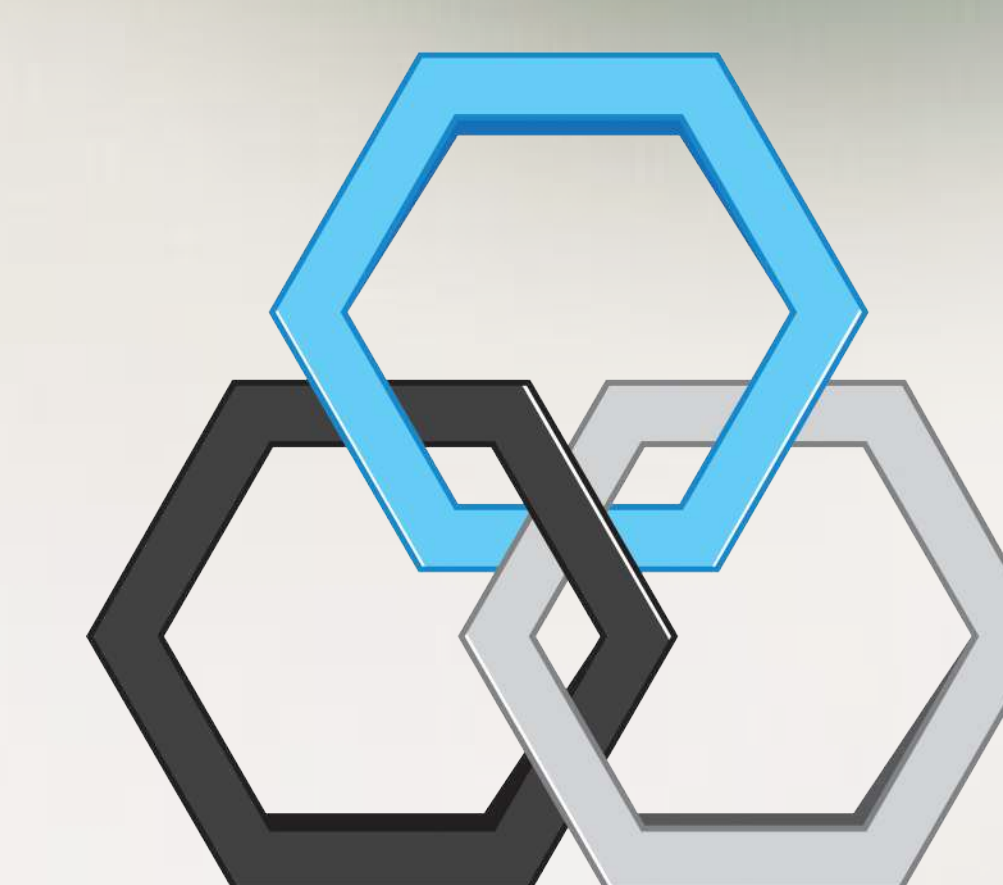

BEPHARM
профессиональная медицина