



BEPHARM
профессиональная медицина

BIOGEL THE STAR

ПРЕПАРАТ ДЛЯ РАБОТЫ
ПО БИОЭСТЕТИЧЕСКИМ
ТОЧКАМ КРАСОТЫ



+7(495)125-12-15

info@bepharm.ru



THE STAR



ПРОТОКОЛ БИОЭСТЕТИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ ОТ АЛИНЫ ВИДЕЛЬГАУЗ

БIOGEL «THE STAR»: ЛИФТИНГ И УВЛАЖНЕНИЕ ПО БИОЭСТЕТИЧЕСКИМ ТОЧКАМ



СОСТАВ

- Комплекс ГК 24 мг/мл (2,4%), сочетающий нативную высокомолекулярную и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту неживотного происхождения степени очистки pharm grade
- Маннитол 1%
- Хлорид натрия
- Вода для инъекций

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕПАРАТА

Низкомолекулярная нативная гиалуроновая кислота, которая подтягивает кожу, всесторонне повышает тонус лица и увлажняет глубокие слои эпидермальных тканей, создавая на лице эффект армирования.

Высокомолекулярная нативная гиалуроновая кислота, которая помогает коже вырабатывать естественный коллаген, подтянуть овал лица, усилить естественные способности удерживать влагу.

Маннитол 1% обладает мощным антиоксидантным действием, профилактирует отечность, адаптирует препарат для деформационно-отечного типа старения.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

- Демакияж рабочей зоны и обеззараживание кожи антисептическими средствами
- Работа препаратом THE STAR в технике «BIOGEL БЭТ»
- Для максимального комфорта рекомендуем заканчивать процедуру стерильной увлажняющей маской BIOGEL «CALM&GLOW»

Процедура максимально комфортна для пациента, не требует анестезии и длится около получаса.

Количество требуемых сеансов зависит от запроса пациента и может варьироваться от 1 до 3 процедур с периодичностью 14–18 дней.



КАК ПРАВИЛЬНО НАЙТИ 11 ТОЧЕК КРАСОТЫ ЛАЙФХАКИ ВИДЕЛЬГАУЗ

ТОЧКА 1

Проведите 2 вертикальные линии от угла рта и от середины нижней губы, соедините вершины получившегося квадрата диагональными линиями. На их пересечении будет ваша первая точка красоты.

ТОЧКА 2

Проведите диагональ от мандибулярного угла нижней челюсти к крылу носа. Отступите 1,5-2 см по этой линии от угла челюсти – это 2 точка.

ТОЧКА 3

Проведите вертикаль по среднезрачковой линии вниз и горизонталь от крыла носа к козелку, на пересечении этих линий находится 3 точка красоты.

ТОЧКА 4

Чтобы найти 4 точку красоты, положите пальцы в зону перед козелком. Попросите пациента несколько раз широко открыть рот – проекция челюстного сустава будет нужным местом для 4 точки.

ТОЧКА 5

Эта точка находится между скуловой связкой и нижнем краем скуловой дуги. Если у вашего пациента выражен маляр, который попадает в эту зону – вам следует сместить точку ниже.

ТОЧКА 6

Точка красоты на шее находится там, где шея переходит в субментальную зону.





THE STAR



ПРОТОКОЛ 1

Рекомендуемая игла: 30G – 6/12mm. Количество препарата на вкол – 0,2 мл.
Точками 1–6 на одной половине лица и на шее обозначены «точки красоты».





THE STAR



ПРОТОКОЛ 2

Рекомендуемая игла: 30G – 6/12mm. Количество препарата на вкол – 0,1 мл.





THE STAR



ПРОТОКОЛ 3

Рекомендуемая игла: 30G – 6/12mm. Количество препарата на вкол – 0,1 мл.



bioGEL

THE
STAR



BEPHARM
профессиональная медицина



+7(495)125-12-15

www.bepharm.ru

info@bepharm.ru

