

ПРИНЦЕССА МОНАКО



СХЕМА



микропапульная
техника



папульная техника

зоны, которые
не прорабатываются



РОСКОШЬ УХОЖЕННОЙ КОЖИ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ

- сияние кожи
- здоровый цвет лица
- сужение пор
- уменьшение пигмента
- разглаживание мелких морщин



bioGEL RED

bioGEL GREEN

bioGEL SILVER LIGHT

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ

Процедура проводится однократно.

Смешайте биоревитализант по показаниям bioGEL RED, bioGEL GREEN или bioGEL SILVER LIGHT с ботулотоксином в классическом восстановлении (100 ед на 2 мл) из расчета:

5 мл + 20 единиц

3 мл + 15 единиц

Работаем иглой 30G на 4 или 6 мм. Рекомендуем шприц 3 мл.

Техника папульная (средняя треть, субментальная зона, шея, декольте) и микропапульная (лоб, латеральные части орбитальной зоны).

Данный коктейль **не используем** внутри орбитальной зоны и над верхней губой.

ПОДБОР ПРЕПАРАТА BIOGEL ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ «ПРИНЦЕССА МОНАКО»

bioGEL RED

- пигментация
- сосудистая сетка
- тусклый цвет кожи
- деформационно-отечный тип старения

bioGEL GREEN

- обезвоженная кожа
- мелкоморщинистый тип старения
- возрастная пигментация
- естественный проявления хроностарения

bioGEL SILVER LIGHT

- расширенные поры
- нарушения себорегуляции
- склонность к высыпаниям
- потеря тургора