



# Протокол bioGEL SILVER



## СОСТАВ:

- Гиалуроновая кислота 1,8%
- Цинк 0,002%
- Аминокислоты (Глутатион, Гидроксипролин, Лизин, Валин, Глицин)

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

лицо, шея, декольте, руки, тело

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- тонкая, дряблая кожа
- работа с акне, пост-акне
- носогубные, межбровные складки
- завершающий этап в программах коррекции фигуры (приведение кожи в тонус после похудения, заполнение стрий)




## ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Армирование:** Линейно-ретроградно, веерно, техника «соты». Армирование производится по ходу линий натяжения кожи.
- **«Сепарация» морщин:** Введение иглы под основание морщины, веерными движениями производится «сепарация» морщины и затем вводится bioGel ZINC.

Глубина введения – в средние и глубокие слои дермы. Работа канюлей 21-22G 5 или 7 мм – векторная техника лифтинга с сопутствующей сепарацией (см. схемы).

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА:

- **Цинк 0,002%**  
Цинк обладает противовоспалительным действием, стимулирует работу фибробластов, участвует в клеточном метаболизме.
- **Гиалуроновая кислота 1,8%**  
Несшитая, высокомолекулярная, неживотного происхождения.  
Молекулярный вес ГК – 2200-2400 кДа.

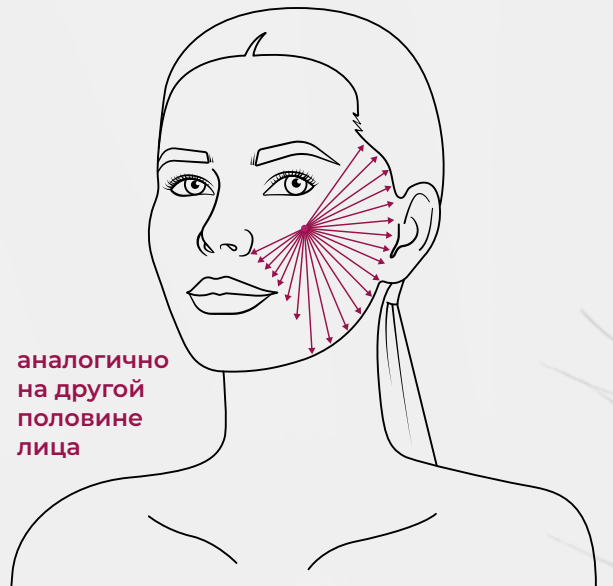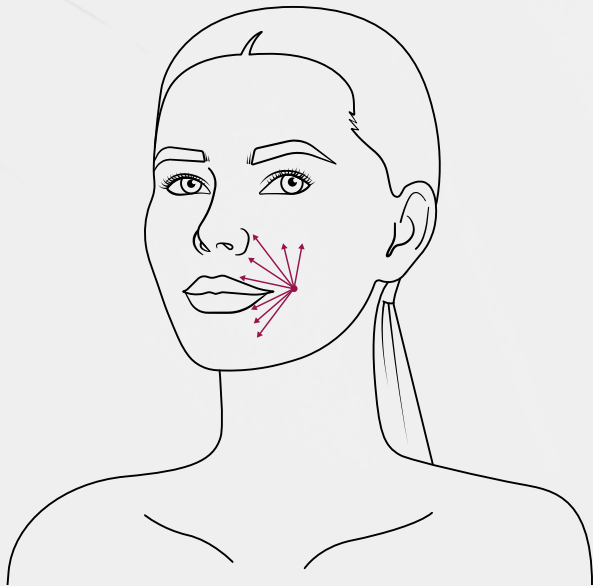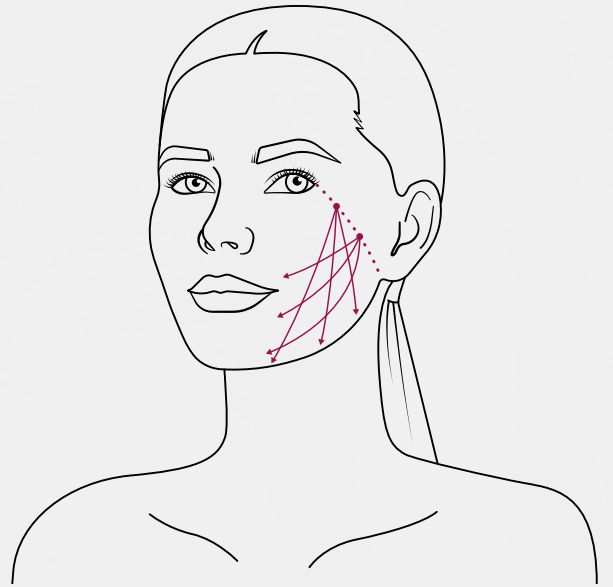

аналогично  
на другой  
половине  
лица

